

Ωτοσκόπιο με κάμερα για καθαρισμό αυτιών Bebird Sight Plus
Εγχειρίδιο χρήσης



Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, παρακαλώ εξοικειωθείτε
με το εγχειρίδιο χρήσης.

Λήψη εφαρμογής



ή



Αναζητήστε τον τίτλο „bebird“
στο κατάστημα εφαρμογών
του smartphone σας

Σαρώστε τον QR κωδικό για να
κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε
την εφαρμογή

Σύνδεση με την εφαρμογή


- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας, για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- 2 Ανοίξετε την εφαρμογή Bebird και πατήστε στο "Σύνδεση συσκευής" (Συνδέστε τη συσκευή).




Αφού ενεργοποιήσετε
τη συσκευή, θα ανάψει
το μπλε φως.



- 3 Συνδέστε το προϊόν στο δίκτυο Wi-Fi "bebird-xx-xxxxxx".

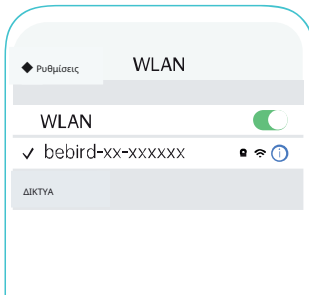

- 4 Επιτρέψτε στην εφαρμογή Bebird και κάντε κλικ στο «Ξεκινήστε να καθαρίζετε τα αυτιά», για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

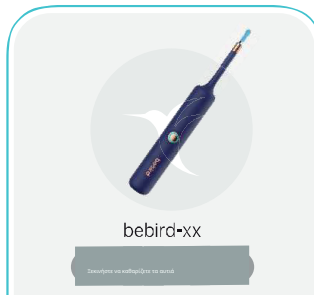

Εμφάνιση προϊόντος



Στερέωση αξεσουάρ

Στερέωση προστατευτικού καπακιού:

Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι του ακουστικού καναλιού στη σωλήνα της κάμερας, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά τοποθετημένο.

Αυτό θα απορρέψει την υπερβολικά βαθιά διείσδυση του ήχου στο ακουστικό κανάλι με τη συσκευή.



Στερέωση του ακουστικού εξαρτήματος:

Για να μπορείτε να στερεώσετε το ακουστικό εξάρτημα, απλώς βιδώστε σφιχτά το μεταλλικό ακουστικό εξάρτημα. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για όλους τους τύπους ακουστικών εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένων των διαφανών διχρωμικών ακουστικών εξαρτημάτων, των διαφανών ακουστικών εξαρτημάτων, των ελαστικών ακουστικών εξαρτημάτων σε σχήμα δακτυλίου και ακουστικών εξαρτημάτων από αφρώδες υλικό.



Στερέωση της λαβίδας:

Τοποθετήστε την προέκταση της λαβίδας πάνω στο σώμα της συσκευής. Σφίξτε σθεναρά την κεφαλή, ώστε να είναι ασφαλισμένη.



Κατάλογος αξεσουάρ Bebird EarSight σειρά SE



Μεταλλικό ,σιλικόνης
καλυμμένο κουτάλι για
αυτιά



Διχρωμία
Q-ελαστικό
κουτάλι για αυτιά



Διχρωμία
δακτυλοειδές κουτάλι
για αυτιά



Εξάρτημα για τη μύτη



Φωτιστικός καθρέφτης για αυτιά



Μαντηλάκι για
τα αυτιά



Αφαιρέτης γλώσσας



Δοχείο για
τα ακουστικά εξαρτήματα



Τσιμπίδα
Συστατικό-B



Καλώδιο φόρτισης



Προστατευτικό βύσμα ακουστικού
καναλιού



Βούρτσα για
φακό



Τσιμπίδα
Συστατικό-A

Κατάλογος αξεσουάρ σειράς Bebird EarSight Plus



Θήκη αξεσουάρ Κουτί αξεσουάρ



Εξάρτημα για τη μύτη



Φωτιστικός καθρέφτης για αυτιά



Αφαιρέτης γλώσσας



Μεταλλικό ,σιλικόνης
καλυμμένο κουτάλι για
αυτιά



Δύο χρώματα
Q-ελαστική
μαντηλάκι για τα αυτιά



Διχρωμία
δακτυλιοειδές κουτάλι
για αυτιά



Μαντηλάκι για
τα αυτιά



Πλαστικό μαντηλάκι για
το αυτί



Τσιμπίδα
Συστατικό-B



Καλώδιο φόρτισης



Προστατευτικό βύσμα ακουστικού
καναλιού



Βούρτσα για
φακό



Τσιμπίδα
Συστατικό-A

Λύση προβλημάτων

Πρόβλημα	Λύση
Το προϊόν δεν λειτουργεί μετά την ενεργοποίηση	Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης
Η LED ένδειξη της κάμερας δεν ανάβει	Αποσυνδέστε , επανεκκινήστε τη συσκευή , για να συνδεθείτε ξανά
Η εφαρμογή κλείνει γρήγορα	Αφαιρέστε την υπάρχουσα εφαρμογή και εγκαταστήστε την ξανά
Η ένδειξη φωτός αναβοσβήνει γρήγορα	Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης
Λανθασμένη απεικόνιση σε την εφαρμογή	Αποσυνδέστε , επανεκκινήστε τη συσκευή , για να συνδεθείτε ξανά
Ασταθής σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi	Αποσυνδέστε , επανεκκινήστε τη συσκευή , για να συνδεθείτε ξανά
Θολή εικόνα	Σκουπίστε τον φακό της κάμερας με διπλής όψης βούρτσα , πανί ή βαμβακερό καθαριστικό ταμπόν βουτηγμένο σε αλκοόλ.
Μη φυσική κίνηση	Εναλλάξτε τη λειτουργία του αριστερού / δεξιού αυτιού στην διεπαφή χρήστη της εφαρμογής.
Εάν το πρόβλημα επιμένει μετά την εκτέλεση των παραπάνω βημάτων , επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών για βοήθεια.	

Επικίνδυνες ουσίες

Όνομα μέρους	Επικίνδυνες ουσίες					
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE
Στοιχεία τυπωμένου κυκλώματος	×	○	○	○	○	○
Κάλυμμα	○	○	○	○	○	○
Ελαστικά αξεσουάρ από πλαστικό	○	○	○	○	○	○

Αυτή η μορφή έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με το πρότυπο SJ/T 11364

○ : Δηλώνει τον συντελεστή επικίνδυνων υλικών σύμφωνα με το GB/T26572-2011

✕ :Ο συντελεστής,δηλώνει ότι ο συντελεστής επικίνδυνων υλικών υπερβαίνει το GB/T26572-2011

Προδιαγραφές

Μάρκα : bebird

Όνομα:Ωτοσκόπιο με κάμερα για καθαρισμό αυτιών Bebird Sight Plus
Μοντέλο #:Bebird EarSight σειρά SE
Σειρά Bebird EarSight Plus
Διάρκεια χρήσης: Έως 60λεπτά (σειρά EarSight SE)

Μέχρι 80 λεπτά (σειρά EarSight Plus) Χρόνος φόρτισης : Περίπου 50 λεπτά Έξυπνη προσανατολισμός: Έξυπνος γυροσκοπικός αισθητήρας με καρδανική ανάρτηση Αισθητήρας εικόνας: CMOS

Είσοδος ρεύματος: 5V=0,5A Συχνότητα λειτουργίας : 2,4 GHz Κατηγορία φακού : 3P* Στενός φακός , IP67 Αδιάβροχος , Ανθεκτικός στη σκόνη και στην ομίχλη Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως 50°C

Αριθμός καρτέ ανά δευτερόλεπτο: 20καρέ .

Πρότυπο δικτύου: IEEE 802.11b/g Βέλτιστη εστιακή απόσταση : 12,5 mm

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



- Συντήρηση:Σκουπίστε τον φακό με βούρτσα φακών.
- Εγκατάσταση : Βεβαιωθείτε ότι όλα τα αξεσουάρ της συσκευής είναι ασφαλώς στερεωμένα , για να αποφευχθεί η πτώση τους κατά τη διάρκεια της χρήσης .
- Περιβάλλον εργασίας: Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε κατάλληλο, ιδιωτικό περιβάλλον.Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση της συσκευής σε πολυσύχναστα μέρη.
- Συντήρηση μπαταρίας: Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να φορτίζεται μία φορά το μήνα,για να διατηρηθεί η μπαταρία σε καλή κατάσταση.
- Επίβλεψη παιδιών : Τα παιδιά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη, για να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα .
- Έκθεση στον ήλιο: Η κύρια συσκευή και τα αξεσουάρ πρέπει να φυλάσσονται μακριά από άμεσο ηλιακό φως, για να αποφευχθεί η μαλάκωση ή η ζημιά.
- Επαφή με νερό: Μην βυθίζετε τη συσκευή σε υγρά.
- Προειδοποίηση θερμοκρασίας: Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η συσκευή μπορεί να θερμαίνεται ήπια λόγω του φωτισμού LED;είναι φυσιολογικό και περιορίζεται σε περίπου 45°C (113°F).
- Σκοπός της ταμπίδας: Οι ταμπίδες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αφαίρεση του αυτιού ή άλλων ξένων σωμάτων από τον ακουστικό πόρο .

Προειδοποίηση και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος μπορείτε να τις βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, γνωρίστε το περιεχόμενο της και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Πριν από τη χρήση, γνωρίστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποίηση για τη χρήση

Κίνδυνος ζημίας του προϊόντος:

● Δεν επιτρέπεται η χρήση ωτοσκοπίου σε συνθήκες υψηλής υγρασίας ή σε έντονη ρύπανση, εκτός αν η συσκευή είναι κατάλληλα προστατευμένη.

● Αποφύγετε να βρέξετε το ωτοσκόπιο στο νερό, εκτός αν ο κατασκευαστής αναφέρει διαφορετικά στις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση ανάγκης, χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς υγρό πανί για καθαρισμό.

● Αποφύγετε απότομες κινήσεις ή πίεση κατά τη χρήση της συσκευής, ώστε να μην βλάψετε τα ευαίσθητα μηχανικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

● Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση της συσκευής και της μπαταρίας – μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο ωτοσκόπιο ή φορτιστές με ορατά σημάδια φθοράς.

Κίνδυνος για τον χρήστη:

● Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κατεστραμμένους ιστούς, τρανές ή φλεγμονώδεις καταστάσεις του αυτιού.

● Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από ενήλικες ή υπό την επίβλεψή τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση παιδιών.

● Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο οι αυθεντικοί προσαρμογείς που προορίζονται από τον κατασκευαστή, για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η υγιεινή.

● Σε περίπτωση δυσφορίας όχι π ο b όλ ο β όλ i ζ κατά τη διάρκεια της χρήσης, είναι απαραίτητο να σταματήσετε τη χρήση της συσκευής και να συμβουλευτείτε τον γιατρό.

● Σε περίπτωση συσκευών που ελέγχονται μέσω εφαρμογής, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ασφαλές Wi-Fi δίκτυο, ώστε να αποφύγετε τις απειλές που σχετίζονται με μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

● Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη ή τροφοδοτούμενη σύμφωνα

με τις οδηγίες του κατασκευαστή πριν από την έναρξη της χρήσης.

● Συνδέστε το ωτοσκόπιο με την κινητή εφαρμογή του κατασκευαστή σύμφωνα με τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι το smartphone είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή μέσω του Wi-Fi δικτύου του ωτοσκοπίου.

● Χρησιμοποιήστε ειδικές άκρες από μαλακό υλικό, για να εισάγετε ήπια την κάμερα στο αυτί, και αποφύγετε την πίεση στις τοίχους του ακουστικού σωλήνα.

● Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα – τακτικά διαλείμματα μειώνουν τον κίνδυνο ερεθισμού.

● Κατά τη διάρκεια της χρήσης, κρατήστε τη συσκευή σταθερή και εισάγετε απαλά την άκρη στο αυτί, ώστε να αποφύγετε τυχόν ζημιά στις εσωτερικές δομές του αυτιού.

● Μετά α κάθε χρήση, καθαρίστε τις άκρες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

● Ak t u a li s u a te τη o pli k a ση, ώστε να να χρησιμοποιείτε τις τελευταίες λειτουργίες και να ε ξασφαλίσετε li βέλτιστη ασφάλεια δεδομένων.

Συντήρηση και αποθήκευση:

● Με σκο ντοή χρήση, είναι απαραίτητο να καθαρίσετε τη συσκευή και να την αποθηκεύσετε σε ξηρό, καθαρό μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και υψηλές θερμοκρασίες.

● Τακτικά ελέγχετε την κατάσταση των ακίδων, καλώδιων και της θήκης της συσκευής για μηχανικές ζημιές.

● Σε περίπτωση συσκευών που τροφοδοτούνται από μπαταρίες, πρέπει να αποφύγετε την πλήρη εκφόρτιση και την αποθήκευση σε ακραίες θερμοκρασίες.

Άλλα μέτρα ασφαλείας

Προσαρμογή στον χρήστη:

● Πριν από την πρώτη χρήση βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει καλιμπραριστεί και είναι πλήρως λειτουργική.

● Σε περίπτωση παιδιών η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων και οι άκρες θα πρέπει να προσαρμόζονται στην ευαίσθητη επιδερμίδα του παιδιού.

Βλάβες και συντήρηση:

● Σε περίπτωση προβλημάτων με τη λειτουργία της κάμερας, παραμόρφωση της εικόνας, διακοπή της σύνδεσης Wi-Fi ή ορατών μηχανικών βλαβών (π.χ. ρωγμές στις άκρες, ζημιά στο περίβλημα) θα πρέπει να σταματήσετε τη χρήση της συσκευής και να επικοινωνήσετε με τον εξουσιοδοτημένο σέρβις του κατασκευαστή.

● Για επισκευές και αντικατάσταση εξαρτημάτων χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή, για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και να διατηρηθεί η εγγύηση.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988. Πληρούν τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων, που αφορούν την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, την ασφάλεια χρήσης υλικών και την αντοχή σε μηχανικές και ηλεκτρονικές βλάβες.

Κατασκευαστής: Heifieng Zhizao (Σεντζέν) Technology Co., Ltd
Διεύθυνση: Δωμάτιο 1205, Κτίριο 1, Vanke Xingchen Building,
Οδός Ξινκιάο, περιοχή Μπάο'αν, Σεντζέν, Γκουανγκντόνγκ, Κίνα
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cs@bebird.com

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ:

Όνομα: INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o.

Διεύθυνση: Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Polska

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: zgloszenia@innpro.pl, service@innpro.eu

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Heifieng Zhizao (Σεντζέν) Technology Co., Ltd δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοφωνικής συσκευής ωτοσκόπιο με κάμερα για καθαρισμό αυτιών Bebird Sight Plus συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ ΕΕ . Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

<https://files.innpro.pl/bebird>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Δωμάτιο 1205, Κτίριο 1, Βάνκε Ξινγκτσέν
Κτίριο, Οδός Ξινκιάο, Περιοχή Μπάο'αν, Σεντζέν, Γκουανγκντόνγκ, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα : 2400MHz-2483,5MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας : <20dBm

Προστασία του περιβάλλοντος



Η χρησιμοποιούμενη ηλεκτρονική συσκευή που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετείται μαζί με άλλα δημόσια απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα μέρη. Εξασφαλίζοντας την σωστή απομάκρυνσή του αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένων συσκευών συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορούν να αποκτηθούν από τον δήμο, σε καθαριστήριο ή σε κατάστημα, όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών που αναφέρονται. Νέας προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορά ζητήματα ασφάλειας χρήσης, της προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, τα οποία καθορίζουν τους κινδύνους που θα πρέπει να εντοπιστούν και να απομακρυνθούν.

Αυτό το έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα /κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται)με δαπάνες του χρήστη ή μέσω εξειδικευμένων κέντρων εξυπηρέτησης με κόστος και σε εύρος του χρήστη. Σε περίπτωση απουσίας πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες συντηρητικές ή υπηρεσιακές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, είναι απαραίτητο να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτήν ενός φυσικά νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή επιβεβαίωσης οποιασδήποτε απόκλισης, είναι απαραίτητο να ληφθούν αμέσως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή υπηρεσίας. Η ανεπαρκής συντήρηση (καθαρισμός) και η αντίδραση τη στιγμή της ανίχνευσης απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημία του προϊόντος. Η εγγύηση δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, ελέγξτε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.

Βεβαιωθείτε ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Ποτέ μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο , μακριά από εύφλεκτα υλικά , διατηρήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μ από άλλα αντικείμενα .

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα τροφοδοσίας , τον σταθμό φόρτισης, τα καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και την πιστοποίηση του κατασκευαστή .

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με στοιχεία, τα οποία είναι δύσκολα να ορθοτούν, εξοπλιστείτε με μια κουβέρτα πυρόσβεσης.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (λιθίου - ιοντική), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, γεννά με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση .

Ο κατασκευαστής καθορίζει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες εργασίας για τη συσκευή , το ίδιο το μπαταρία εί και νέα και πλήρως φορτισμένη . Η διάρκεια λειτουργίας σε πραγματικές συνθήκες μπορεί να διαφέρει από την δηλωμένη στην προσφορά και δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής , αλλά

χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας , δεν συνιστάται να αποφορτίζεται κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για το άρθρο , το μόνιμα βλάπτουν και δεν καλύπτονται από την εγγύηση . Σε περίπτωση διακοπής χρήσης της μπαταρίας ή ολοκλήρωσης της συσκευής για διάστημα μεγαλύτερο από έναν μήνα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε τακτικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της . Φυλάξτε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος , μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, φθείρεται με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση .

Ο κατασκευαστής αναφέρει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες , όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες για τη λειτουργία της συσκευής , και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη . Η διάρκεια λειτουργίας σε πραγματικές συνθήκες μπορεί να διαφέρει από την δηλωμένη στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής , αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας , δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε κάτω από το επίπεδο 3,5V ή 5 % συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το άρθρο , την καταστρέφουν μόνιμα και δεν καλύπτονται από την εγγύηση . Σε περίπτωση , που δεν θα χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολοκλήρωσε τη συσκευή για περισσότερο από έναν μήνα , είναι απαραίτητο να φορτίσετε την μπαταρία στο 50 % και να ελέγχετε τακτικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της . Φυλάξτε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος , μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Στοιχεία μπαταρίας:

Κατηγορία: Φορητή μπαταρία

Τύπος: Μπαταρία ιόντων λιθίου (Li-ion)

Καθαρό βάρος: 0,0048 kg

Χωρητικότητα: 230 mAh

Υπερβασή της επιτρεπόμενης περιεκτικότητας σε κάδμιο (0,002%) ή μόλυβδο (0,004%): όχι