



Ωτοσκόπιο με κάμερα καθαρισμού αυτιών
Bebird T15

Οδηγίες λειτουργίας


Βήμα 1: Λήψη της εφαρμογής

iOS: Android: Αναζήτηση για 'bebird' στο
Google Play



Μπορείτε επίσης να σαρώσετε
τον κωδικό QR για να
κατεβάσετε την εφαρμογή.

Ανοίξτε την εφαρμογή.
Συνδέστε τη συσκευή σας στο WiFi.

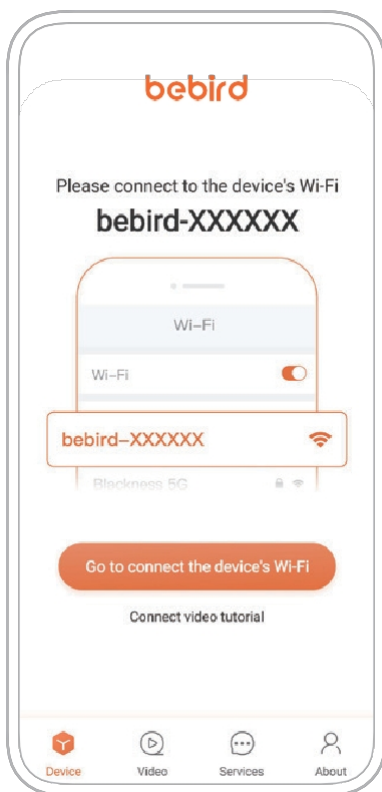

Σύνδεση WiFi


1

Συνδέστε το προϊόν με το WiFi "bebird-T15-000000"



2

Επιστροφή στην εφαρμογή bebird Κάντε κλικ στο "GO" για να τη χρησιμοποιήσετε.

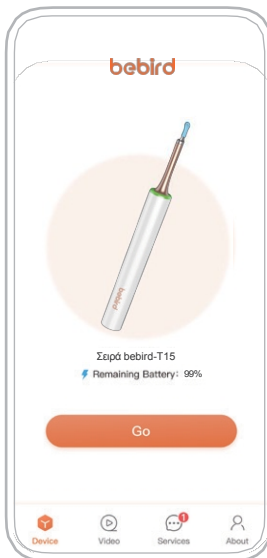

Αντικατάσταση μύτης

Περιστρέψτε το άκρο του αυτιού, τραβήξτε το και αντικαταστήστε το, και στη συνέχεια τοποθετήστε το νέο άκρο.

Τοποθετήστε και
α σ φ α λ ί σ τ
ε
άκρη του αυτιού.



Συναρμολογήστε σωστά πριν από τη χρήση για να αποφύγετε την πτώση.

Φόρτωση

Το κόκκινο φως είναι πάντα αναμμένο.



Περιεχόμενα της συσκευασίας

1

Ακουστικό από μέταλλο και
σιλικόνη (μικρό) x1

Αβλαβής καθαρισμός αυτιών



2

Q-ελαστικό δίχρωμο άκρο
αυτιού (μικρό) x1

Ενδεδεχής αφαίρεση κεριού
από το αυτί



5

Μεταλλικός συμπιεστής ατελειών
x1

Εύκολη αφαίρεση των ατελειών



6

Σφουγγάρι αυτιού x2

Αφαίρεση κεριού αυτιού



3

Δακτύλιος δύο χρωμάτων
x1



7

Θήκη αποθήκευσης x1
Αποθηκεύστε τα αξεσουάρ
μέσα



4

Q-ελαστικό δίχρωμο άκρο
αυτιού (μεγάλο) x1
Εύκολη και σχολαστική
αφαίρεση κεριού από το αυτί



8

Καλώδιο φόρτισης USB-C x1



Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα	Λύση
Το προϊόν δεν λειτουργεί με ισχύ. όταν ενεργοποιείται	Φορτίστε τη συσκευή για 85 λεπτά χρησιμοποιώντας ένα τυπικό καλώδιο USB.
Η ένδειξη της κάμερας δεν ανάβει.	Απενεργοποιήστε ή εκτόξευστο ξανά το προϊόν.
Αποτυχία εφαρμογής	Απεγκαταστήστε την εφαρμογή και εγκαταστήστε την ξανά.
Η μύτη δεν μπορεί να εγκατασταθεί ομαλά.	Περιστρέψτε το άκρο του αυτιού, τραβήξτε το και αντικαταστήστε το.
Δείκτης κόκκινη λάμπει στο τροφοδοσία.	Φορτίστε το προϊόν για 85 λεπτά χρησιμοποιώντας ένα τυπικό καλώδιο USB.
Μετά την επιτυχή σύνδεση, η εφαρμογή δεν εμφανίζεται κανονικά.	Αποσυνδέστε το WiFi και επανασυνδέστε το.
Η σύνδεση WiFi είναι ασταθής. Μερικές φορές αποσυνδέεται λίγα λεπτά μετά τη δημιουργία της σύνδεσης.	Επανεκκίνηση προϊόν ή επανασυνδέστε την εφαρμογή.
Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.	

Επικίνδυνες ουσίες

Όνομα του τμήματος	Επικίνδυνες ουσίες					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Εξαρτήματα τυπωμένων κυκλωμάτων	×	○	○	○	○	○
Στέγαση	○	○	○	○	○	○
Πλαστικό και καουτσούκ αξεσουάρ	○	○	○	○	○	○

Αυτή η μορφή έχει διατυπωθεί σύμφωνα με την SJ/T 11364.
ο: αντιπροσωπεύει έναν παράγοντα επικίνδυνων υλικών κάτω από GB/T26572-2011
χ: αντιπροσωπεύει παράγοντα επικίνδυνων υλικών πάνω από GB/T26572-2011

Παράμετροι προϊόντος

Μοντέλο: T15

Βάρος: 25g

Πρότυπο δικτύου: IEEE

802.11b/g/n Κεραία: Συχνότητα

λειτουργίας: Εσωτερική κεραία

FPC: 2,4 GHz Ρυθμός μετάδοσης

βίντεο: 20fps Αισθητήρας εικόνας:

CMOS Θερμοκρασία λειτουργίας:

2,4 GHz: -10°C ~ 45°C

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία:

επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 300

mAh Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 85 λεπτά

Χρόνος φόρτισης: Διάμετρος

φακού: 85 λεπτά Ρεύμα

εισόδου: 5V 0.5A: Διάμετρος:

3.5mm

Βέλτιστη εστιακή απόσταση: 10 ~ 20 mm

Βάθος πεδίου: 10 ~ 20 mm

Pixel: 5 megapixel

Γυροσκόπιο: 6 αξόνων

Προσοχή

- Κατά τον καθαρισμό του φακού, σκουπίστε τον προσεκτικά με μια μπατονέτα εμποτισμένη με οινόπνευμα.
- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το άκρο είναι καλά τοποθετημένο για να μην πέσει έξω.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εν κινήσει και προστατέψτε το από χτυπήματα άλλων.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν μόνο τους για να αποφύγουν τυχαίες ζημιές.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε υγρό για να αποφύγετε ζημιές.
- Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, οπότε θα πρέπει να φορτίζεται μία φορά το μήνα, εάν δεν χρησιμοποιείται συχνά.
- Αποφύγετε την άμεση έκθεση του προϊόντος στο ηλιακό φως, ιδίως των αξεσουάρ, για να αποφύγετε το μαλάκωμα.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η θερμοκρασία του προϊόντος θα αυξηθεί ελαφρώς (δεδομένα από το εργαστήριο bebird, η μέγιστη θερμοκρασία δεν υπερβαίνει περίπου τους 35°C), παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το με εμπιστοσύνη.

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης

Κατασκευαστής: Heifeng Zhizao (Shenzhen) Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση: Xingchen Building, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen city, Guangdong province, China

Προϊόν: Ωτοσκόπιο με κάμερα καθαρισμού

αυτιών Μοντέλο: T15

Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ραδιοεξοπλισμού και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Δήλωση συμμόρφωσης διαθέσιμη στη διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/Bebird>

Ραδιοσυχνότητα: 2400-2483.5MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας $\leq 20\text{dBm}$

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.



Εισαγωγέας & Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινελικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φινελικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την παρουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Στοιχεία μπαταρίας:

Κατηγορία: Φορητή μπαταρία

Τύπος: Μπαταρία ιόντων λιθίου (Li-ion)

Καθαρό βάρος: 0,0055 kg

Χωρητικότητα: 300 mAh

Υπέρβαση της επιτρεπόμενης περιεκτικότητας σε κάδμιο (0,002%) ή μόλυβδο (0,004%): όχι