



Ωτοσκόπιο με κάμερα καθαρισμού αυτιών
Bebird Note 5

Οδηγίες λειτουργίας


Βήμα 1: Λήψη της εφαρμογής

iOS: Android: Αναζήτηση για 'bebird' στο
Google Play




Μπορείτε επίσης να σαρώσετε
τον κωδικό QR για να
κατεβάσετε την εφαρμογή.


Ανοίξτε το
κάλυμμα. Η
τροφοδοσία
ενεργοποιείται
αυτόματα.

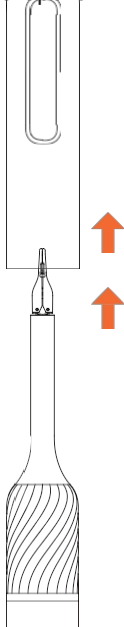


Ανοίξτε την
εφαρμογή. Συνδέστε
τη συσκευή σας στο
WiFi.

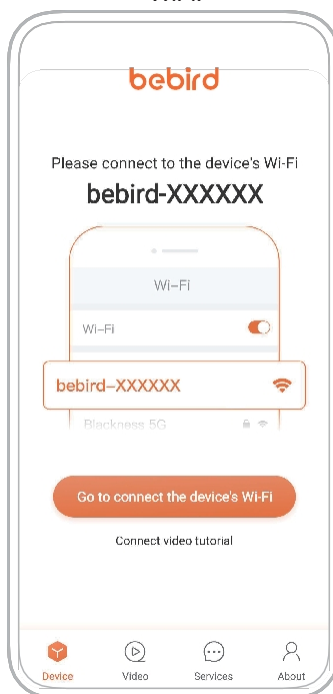

Συνδέστε το προϊόν
στο WiFi. "bebird-
Note5-xxxxxxx"

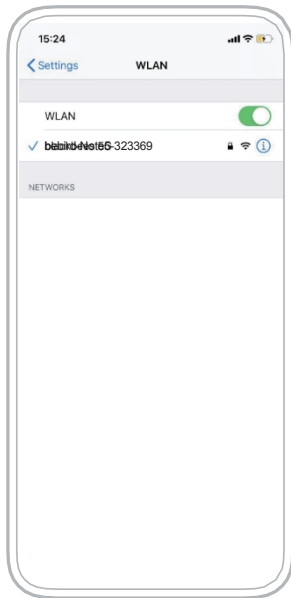


Επιστροφή στην
εφαρμογή bebird Κάντε
κλικ στο "GO" για να τη
χρησιμοποιήσετε.

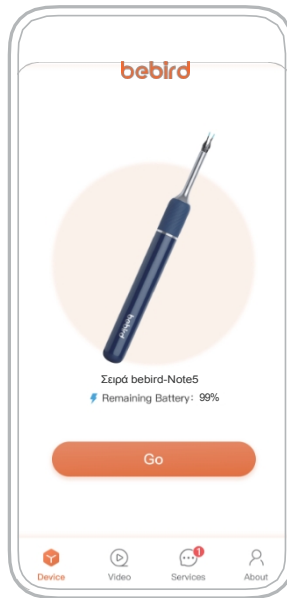

Οπτική οθόνη



Πατήστε το κουμπί για να
ελέγχετε το σιμπιδάκι.

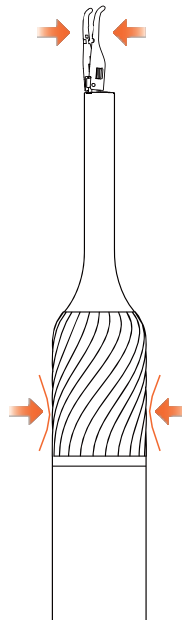

Πατήστε
παρατεταμένα για
να κλείσετε.
Απελευθερώστε
για να ανοίξετε.

Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα	Λύση
Καμία απόκριση μετά την εκκίνηση	Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό καλώδιο για φόρτιση.
Η ένδειξη LED της κάμερας δεν ανάβει.	Διακόψτε τη σύνδεση, επανεκκινήστε το προϊόν και επανασυνδεθείτε.
Η εφαρμογή κλείνει γρήγορα.	Αφαιρέστε την υπάρχουσα εφαρμογή και επανεγκαταστήστε την.
Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει γρήγορα.	Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό καλώδιο για φόρτιση.
Εσφαλμένη εμφάνιση στην εφαρμογή	Διακόψτε τη σύνδεση, επανεκκινήστε το προϊόν και επανασυνδεθείτε.
Η σύνδεση Wi-Fi ήταν ασταθής και αποσυνδέθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα.	Διακόψτε τη σύνδεση, επανεκκινήστε το προϊόν και επανασυνδεθείτε.
Θόλωση της οπτικής διεπαφής	Χρησιμοποιήστε μια μπατονέτα για το σκούπισμα.
Σύγχυση κατά τη χρήση	Αλλαγή λειτουργίας αριστερού/δεξιού αυτιού στο περιβάλλον εργασίας της εφαρμογής.
Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.	

Επικίνδυνες ουσίες

Όνομα του τμήματος	Επικίνδυνες ουσίες					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Εξαρτήματα τυπωμένων κυκλωμάτων	×	○	○	○	○	○
Στέγαση	○	○	○	○	○	○
Πλαστικό και ελαστικό αξεσουάρ	○	○	○	○	○	○

Αυτή η μορφή έχει διατυπωθεί σύμφωνα με την SJ/T 11364.
ο: αντιπροσωπεύει παράγοντα επικίνδυνων υλικών κάτω από GB/T26572-2011
x: αντιπροσωπεύει παράγοντα επικίνδυνων υλικών πάνω από GB/T26572-2011

Προσοχή

- Κατά τον καθαρισμό, σκουπίστε προσεκτικά το φακό με μια μπατονέτα.
- Το κάλυμμα της άκρης του αυτιού πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένο και να μην είναι χαλαρό για να μην πέσει έξω.
- Δώστε προσοχή στο περιβάλλον πριν από τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλον που είναι επιρρεπές σε χτυπήματα.
- Για να αποφύγετε τυχαίους τραυματισμούς, αποτρέψτε τα παιδιά από το να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν μόνα τους.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή μέσα σε υγρά.
- Συνιστάται η επαναφόρτιση του προϊόντος μία φορά το μήνα.
- Η θερμοκρασία του προϊόντος θα αυξηθεί ελαφρώς κατά τη διάρκεια της χρήσης (δεδομένα από το εργαστήριο bebird δείχνουν ότι η μέγιστη θερμοκρασία ολόκληρης της μονάδας δεν υπερβαίνει τους 45°C περίπου).
- Οι άκρες της τσιμπίδας χρησιμοποιούνται μόνο για την αφαίρεση του κεριού του αυτιού και των ξένων σωμάτων από τον ακουστικό πόρο. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.

Παράμετροι προϊόντος

Βέλτιστη εστιακή απόσταση: 13,5

mm Βάθος πεδίου: 10-50 mm

Γυροσκόπιο: Ευφυές γυροσκόπιο gimbal

Χρόνος λειτουργίας: Χρόνος λειτουργίας:

Περίπου 90 λεπτά

Χρόνος φόρτισης: Θερμοκρασία

λειτουργίας: Περίπου 60 λεπτά

Ρυθμός μετάδοσης βίντεο: 20fps:

Λειτουργία: -10°C ~ 50°C Παράμετροι


εισόδου: DC 5V 0.5A Συχνότητα

λειτουργίας: DC 5V 0.5A: 2,4 GHz

Πρότυπο δικτύου: IEEE 802.11b/g

Αισθητήρας εικόνας: CMOS


Περιγραφή προϊόντος

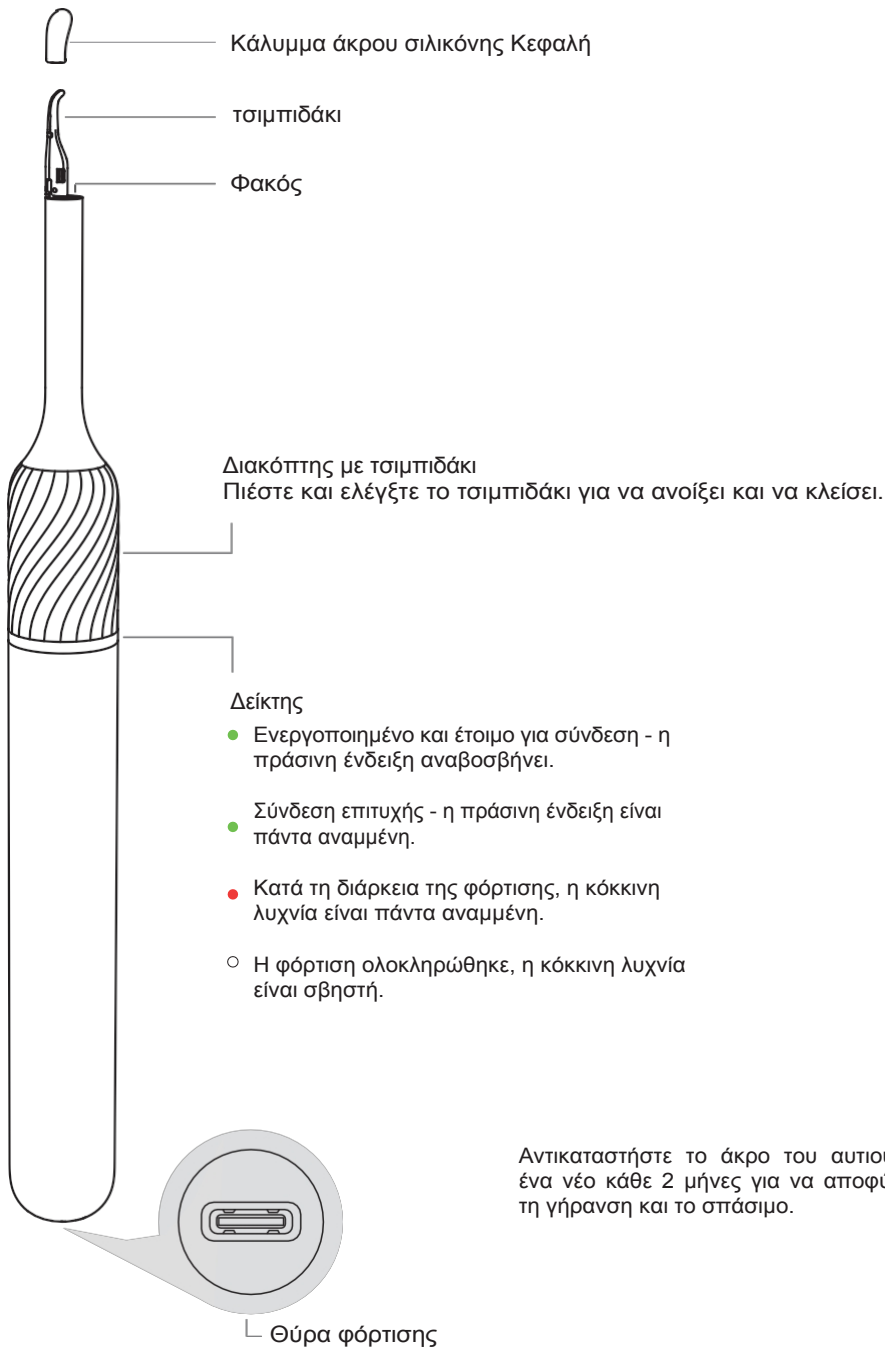

Περιεχόμενα της συσκευασίας





Πολύχρωμα και φιλικά προς το
δέρμα ακουστικά αυτιών

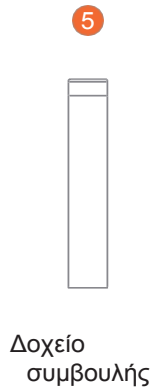

Χρήση τσιμπιδάκια


Κρατήστε σταθερά τον διακόπτη της τσιμπιδάς με δύο δάχτυλα και αφαιρέστε το άκρο με το άλλο χέρι.

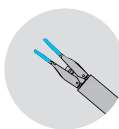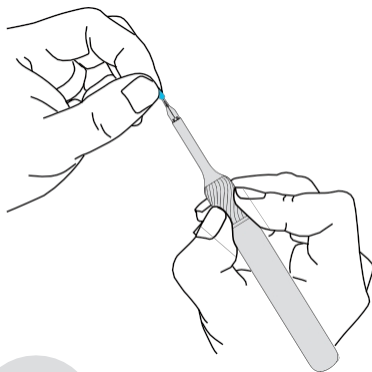

Το τσιμπιδάκι ανοίγει αυτόματα όταν απελευθερωθεί ο διακόπτης.

Πώς να αλλάξετε το ακουστικό

Πιέστε πρώτα τον διακόπτη της τσιμπιδάς, ώστε η τσιμπίδα να είναι κλειστή. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το σετ άκρων αυτιού.

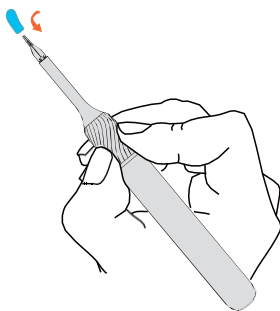

Προσοχή:

Το άκρο πρέπει να τοποθετείται όσο το δυνατόν βαθύτερα στο τσιμπιδάκι για να μην πέσει έξω. Εάν το άκρο έχει υποστεί ζημιά, σταματήστε αμέσως να το χρησιμοποιείτε.

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης

Κατασκευαστής: Heifeng Zhizao (Shenzhen) Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση: Xingchen Building, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen city, Guangdong province, China

Προϊόν: Ωτοσκόπιο με κάμερα καθαρισμού
αυτιών Μοντέλο: Note5

Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ραδιοεξοπλισμού και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Δήλωση συμμόρφωσης διαθέσιμη στη διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/Bebird>

Ραδιοσυχνότητα: 2400-2483.5MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας $\leq 20\text{dBm}$

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.



Εισαγωγέας & Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινελικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την παρουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Στοιχεία μπαταρίας:

Κατηγορία: Φορητή μπαταρία

Τύπος: Μπαταρία ιόντων λιθίου (Li-ion)

Καθαρό βάρος: 0,0048 kg

Χωρητικότητα: 230 mAh

Υπέρβαση της επιτρεπόμενης περιεκτικότητας σε κάδμιο (0,002%) ή μόλυβδο (0,004%): όχι