

# bebird

Έξυπνη Συσκευή Καθα-  
ρισμού Αυτιών



Σπίτι 30S

Οικογενειακή Έκδοση

Παρακαλώ διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος.

# Περιεχόμενα

## Οδηγός Προετοιμασίας

- 01 Κατεβάστε την εφαρμογή, Λειτουργία Ηλικιωμένων, Βίντεο Οδηγίες
- 02 Σύνδεση Εφαρμογής

## Εισαγωγή Προϊόντος

- 03 Αξεσουάρ στη Θήκη
- 04 Όνομα Κύριας Συσκευής
- 05 Εγκατάσταση Αξεσουάρ Θήκης
- 06 Τύποι Αξεσουάρ

- 07 Ενότητα Ευεξίας Αυτιών Αξεσουάρ Ευεξίας Αυτιών Κάψουλα Εγκατάσταση Αξεσουάρ Κάψουλας Ευεξίας Αυτιών Χρήση Αξεσουάρ Κάψουλας Ευεξίας Αυτιών (τσιμπίδα, [σύνδεσμος παροχής υγρού](#)) Χρήση Αξεσουάρ Κάψουλας Ευεξίας Αυτιών (σωλήνας, [καπάκι για έλεγχο αυτιών](#), [καλώδιο φόρτισης](#), [βούρτσα φακού](#))

## Άλλη Ενότητα

- 11 Επίλυση Προβλημάτων, Επικίνδυνες Ουσίες
- 12 Προδιαγραφές Προϊόντος, Προειδοποιήσεις, Εγγύηση
- 13 Προειδοποίηση FCC

## Κατεβάστε την Εφαρμογή



ή



Αναζητήστε "bebird"  
στο Κατάστημα Εφαρμογών του Τηλεφώνου σας

Σαρώστε τον Κωδικό QR για να Κατεβάσετε  
την bebird Εφαρμογή και να την Εγκαταστήσετε

## Λειτουργία Ηλικιωμένων



Λειτουργία Ηλικιωμένων: Σαρώστε αυτόν τον Κωδικό QR  
για να χρησιμοποιήσετε χωρίς να κατεβάσετε.

## Βίντεο Οδηγίες



Για περισσότερα εκπαιδευτικά βίντεο,  
παρακαλώ σκανάρετε τον QR κωδικό.

## Σύνδεση εφαρμογής

1


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας  
το ενεργοποιήσετε τη συσκευή.



Το μπλε φως θα ανάψει  
μόλις η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.


2

Ανοίξτε την εφαρμογή bebird και κάντε κλικ  
“Συνδέστε το προϊόν”.

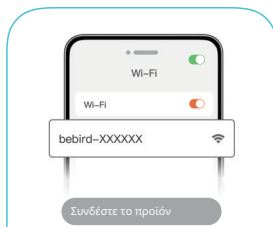

3

Συνδέστε τη συσκευή μέσω WiFi  
("Όνομα WiFi: bebird-Home 30S-XXXXXX").

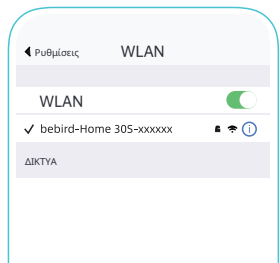

4

Επιστρέψτε στην εφαρμογή bebird και κάντε κλικ  
“Αρχίστε να καθαρίζετε τα αυτιά” για να ξεκινήσετε τη χρήση.



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η αποστείρωση UVC θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν το προϊόν είναι απενεργοποιημένο. Αποφύγετε  
την άμεση έκθεση στο δέρμα, ειδικά στα μάτια, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποστείρωσης.

## Αξεσουάρ στη θήκη



## Όνομα κύριας συσκευής

 Η αποστείρωση UVC θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν το προϊόν είναι απενεργοποιημένο. Απόφυγε την άμεση επαφή με το δέρμα, ιδιαίτερα με τα μάτια, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποστείρωσης.

Φακός κάμερας

Σωλήνας

Ο σωλήνας μπορεί να περιστραφεί σε οποιαδήποτε γωνία για να αποφευχθούν οι τυφλές γωνίες.

Δείκτες

Κατά την ενεργοποίηση και τη σύνδεση, το μπλε φως δείκτη θα αναβοσβήνει.

Μόλις συνδεθεί, το μπλε φως θα παραμείνει αναμμένο.

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το πράσινο φως δείκτη παραμένει αναμμένο.

Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, το πράσινο φως δείκτη σβήνει.

Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, το μπλε φως δείκτη θα αναβοσβήνει γρήγορα.

Κουμπί τροφοδοσίας

Πίεσε και κράτησε το διακόπτη, το μπλε φως θα ανάψει.

Θύρα φόρτισης  
Αφαίρεσε το καπάκι κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

## Εγκατάσταση αξεσουάρ θήκης

Παρακαλώ εγκαταστήστε με τη σειρά: βήμα 1 -> βήμα 2 -> βήμα 3


### Βήμα 1:

Τοποθέτησε την υγιεινομική κουκούλα στην κύρια συσκευή και σφίξτε την. Υπάρχουν κλίμακες σημειωμένες για αναφορά.



### Βήμα 2:

Τοποθετήστε το προστατευτικό βύσμα του ακουστικού καναλιού στη σωστή θέση στην υγιεινή θήκη για να αποτρέψετε την υπερβολική εισαγωγή του στο ακουστικό κανάλι.

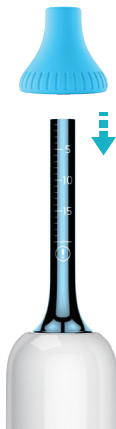

### Βήμα 3:

Οι μέθοδοι εγκατάστασης για τον ξύστη κεριού αυτιών, το σιλικόνης περιτυλιγμένο κουτάλι αυτιού, την άκρη χαλάρωσης και την κεφαλή προσκόλλησης κεριού αυτιών είναι οι ίδιες.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Έχουμε σχεδιάσει ξεχωριστές υγιεινές θήκες για ηλικιωμένους ενήλικες, ενήλικες και παιδιά. Για να αποτραπεί η διασταυρούμενη μόλυνση, συνιστάται να μην μοιράζεστε αυτές τις θήκες.
- Έλεγξε τις άκρες καθαρισμού αυτιών για τυχόν ζημιές πριν από τη χρήση. Αν είναι κατεστραμμένες, αντικατέστησέ τις άμεσα.

## Τύποι αξεσουάρ



Άκρη χαλάρωσης  
Γυρίστε ή σύρετε απαλά την  
άκρη χαλάρωσης για να χαλαρώσετε  
τα νύχια μέσα στον ακουστικό  
πόρο.



Κουτάλι αυτιού με σιλικόνη  
Ανασκαλέψτε διάφορα κεριά αυτιού.



Ξύστης λιπαρού κεριού αυτιού  
Ξύστε το λιπαρό κερί αυτιού.



Προστατευτικό βύσμα ακουστικού πόρου  
Αποφύγετε να το εισάγετε πολύ βαθιά στον ακουστικό πόρο.



Υγειονομική κάλυψη  
Συνιστάται να μην  
μοιράζεστε αυτές τις καλύψεις.



Κουτάλι Αυτιών σε Σχήμα Δακτυλίου με Σιλικόνη  
Ανασκαλέψτε διάφορα κεριά αυτιού.



Μεταλλικό Κουτάλι Αυτιών με  
Λείο, Στρογγυλό Άκρο  
Ανασκαλέψτε διάφορα κεριά αυτιού.



Κεφαλή κολλημένου κεριού αυτιού  
Αφαιρέστε το κερί από το ξηρό αυτί.



Στοιχείο τσιμπιδας-B

Χρησιμοποιήστε την τσιμπίδα για να αφαιρέσετε το κερί αυτιού.


### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι σωστά συναρμολογημένα πριν από τη χρήση, ώστε να αποφευχθεί η πτώση ή η χαλάρωσή τους.
- Για να αποφευχθεί η διασταυρούμενη μόλυνση, συνιστάται να καθαρίζετε τις άκρες μετά από κάθε χρήση.
- Η κεφαλή καθαρισμού αυτιών με κολλητική επιφάνεια διαθέτει μαλακή καουτσούκ κάλυψη από προεπιλογή. Βεβαιωθείτε ότι θα την αφαιρέσετε πριν από τη χρήση.
- Ο αποξεστήρας λιπαρού κεριού αυτιών και η κεφαλή καθαρισμού αυτιών είναι αναλώσιμα αξεσουάρ, οπότε παρακαλώ απορρίψτε τα μετά τη χρήση.

## Αξεσουάρ στην κύρια κάψουλα




## Εγκατάσταση αξεσουάρ κάψουλας

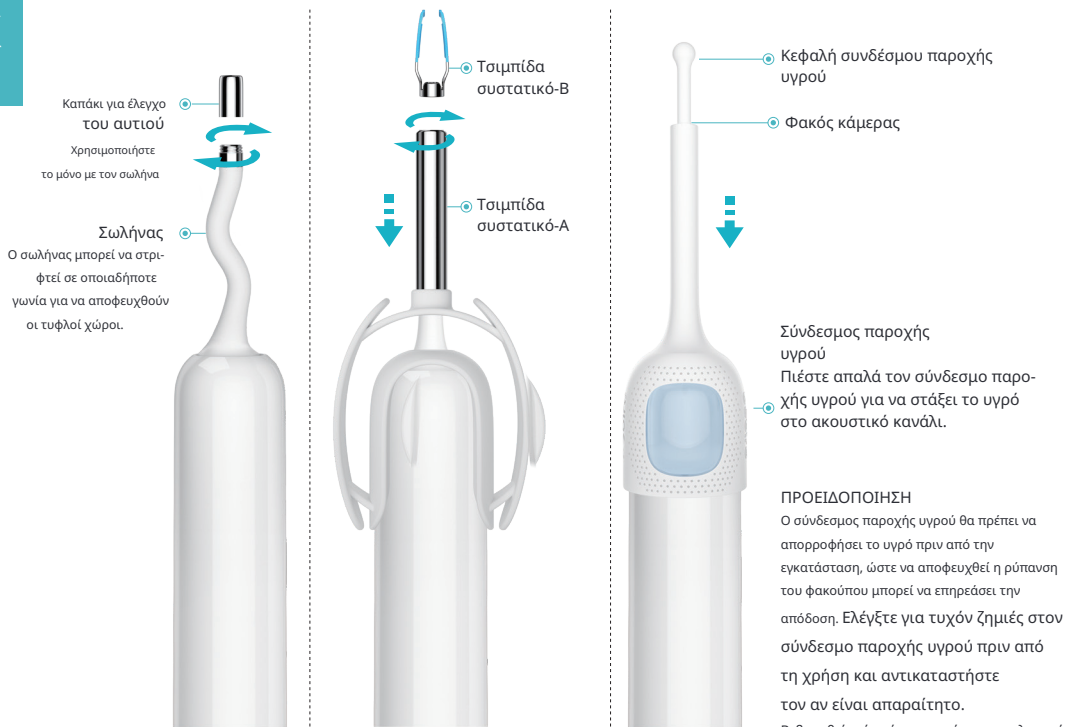


## Χρήση αξεσουάρ κάψουλας

Πώς να χρησιμοποιήσετε τα εξαρτήματα τοιμπίδας

**Βήμα 1:** Σφίξτε τις λαβίδες και εισάγετέ τις αργά στο ακουστικό κανάλι, καθοδηγώντας τις προς το κερί ή άλλο κηρώδες υλικό που πρέπει να πιαστεί.

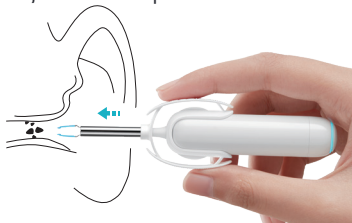

**Βήμα 2:** Σφίξτε το κερί και προσεκτικά τραβήξτε το έξω από τον ακουστικό πόρο. Οι λαβίδες θα ανοίξουν αυτόματα όταν απελευθερώσετε τα δάχτυλά σας.

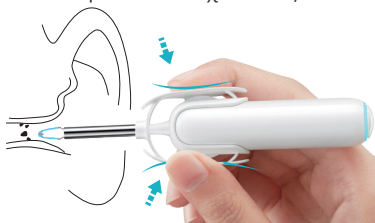

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο παροχής υγρού

**Βήμα 1:** Εισάγετε το στο υγρό και πιέστε/αφήστε τον σύνδεσμο παροχής για να ρουφήξετε το υγρό.



**Βήμα 2:** Αργά και προσεκτικά εισάγετε το στο αυτί και στη συνέχεια πιέστε απαλά τον σύνδεσμο παροχής για να στάξει το υγρό στο ακουστικό κανάλι.



## Χρήση αξεσουάρ κάψουλας

Ο σωλήνας και το καπάκι για τον έλεγχο των αυτιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εξής:

### 1 Σωλήνας

Ο σωλήνας μπορεί να περιστραφεί σε οποιαδήποτε γωνία για να αποφευχθούν οι τυφλές γωνίες.



### 2 Καπάκι για τον έλεγχο των αυτιών

Το καπάκι για τον έλεγχο των αυτιών θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τον σωλήνα. Αργά και προσεκτικά εισάγετε το στο αυτί για να το εξετάσετε.



## Άλλα αξεσουάρ



Καλώδιο φόρτισης



Βούρτσα φακού  
Καθαρισμός σκόνης φακού

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τοποθετήστε το καλώδιο φόρτισης και τη βούρτσα φακού μαζί στην χαρτόνι θήκη μέσα στο κουτί συσκευασίας.

## Αντιμετώπιση Προβλημάτων

| Πρόβλημα                                                                                                                                | Λύση                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Καμία απόκριση μετά την εκκίνηση                                                                                                        | ● Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης για τη φόρτιση                                     |
| Η λυχνία LED της κάμερας δεν ανάβει                                                                                                     | ● Διακόπηκε η σύνδεση, επανεκκινήστε το προϊόν για να επανασυνδεθείτε                              |
| Η εφαρμογή κλείνει γρήγορα                                                                                                              | ● Διαγράψτε την υπάρχουσα εφαρμογή και εγκαταστήστε την εκ νέου                                    |
| Η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα                                                                                             | ● Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης για τη φόρτιση της συσκευής σας                    |
| Λανθασμένη εμφάνιση στην εφαρμογή                                                                                                       | ● Διακοπή σύνδεσης, επανεκκίνηση του προϊόντος για επανασύνδεση                                    |
| Η σύνδεση wificonnection ήταν ασταθής και αποσυνδέθηκε εντός δευτερολέπτων                                                              | ● Διακοπή σύνδεσης, επανεκκίνηση του προϊόντος για επανασύνδεση                                    |
| Η εικόνα είναι θολή                                                                                                                     | ● Σκουπίστε το φακό της κάμερας με ένα πινέλο δύο όψεων ή ένα στυπί εμποτισμένο με οινόπνευμα.     |
| Η κίνηση εμφανίζεται αφύσικη                                                                                                            | ● Αλλάξτε μεταξύ της λειτουργίας αριστερού και δεξιού αυτιού στο περιβάλλον εργασίας της εφαρμογής |
| Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις παραπάνω διαδικασίες, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών στο (844) 423 2473. |                                                                                                    |

## Επικίνδυνες Ουσίες

| Όνομα Μέρους                 | Επικίνδυνη ουσία |    |    |         |     |      |
|------------------------------|------------------|----|----|---------|-----|------|
|                              | Pb               | Hg | Cd | Cr (VI) | PBB | PBDE |
| Εκτυπωμένη Πλακέτα Συστατικά | ×                | ○  | ○  | ○       | ○   | ○    |
| Θήκη                         | ○                | ○  | ○  | ○       | ○   | ○    |
| Πλαστικό Ελαστικό Αξεσουάρ   | ○                | ○  | ○  | ○       | ○   | ○    |

Αυτή η φόρμα έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με το SJ/T 11364

○ : Αναπαριστά την αναλογία επικίνδυνων υλικών που είναι κάτω από το GB/T26572-2011

× : Αναπαριστά την αναλογία επικίνδυνων υλικών που είναι πάνω από το GB/T26572-2011

## Προδιαγραφές Προϊόντος

Μάρκα: Bebird  
Όνομα: EarCare Pro  
Μοντέλο #: Σπίτι 30S  
Χρόνος χρήσης: Περίπου 80 λεπτά  
Χρόνος φόρτισης: Περίπου 60 λεπτά  
Βέλτιστη εστιακή απόσταση: 11mm  
Λειτουργική περιβάλλον: -10°C έως 50°C

Έξυπνη κατεύθυνση: 9-άξονας έξυπνος γυροσκοπικός  
Βαθμός φακού: 3P \* ανθεκτικός στη σκόνη και την ομίχλη  
Αισθητήρας εικόνας: CMOS  
Ρυθμός μετάδοσης εικόνας: 20fps  
Είσοδος ρεύματος: 5V...0.5A  
Λειτουργική συχνότητα: 2.4GHz  
Πρότυπο δικτύου: IEEE 802.11b/g



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Σκουπίστε τον φακό με αλκοολούχα μαντηλάκια ή με βούρτσα φακού.
- Συναρμολογήστε σωστά τα αξεσουάρ του προϊόντος για να αποφευχθεί η πτώση τους κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Καθαρίστε και απολυμάνετε τα υγρά μέρη του προϊόντος **καλά πριν και μετά τη χρήση**.
- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον λειτουργίας είναι κατάλληλο.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε πολυσύχναστα μέρη.
- Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Εάν δεν χρησιμοποιείται συχνά, συνιστάται να φορτίζετε την μπαταρία μία φορά το μήνα.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν μόνο τους για να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα.
- Αποφύγετε την έκθεση του κύριου σώματος και των αξεσουάρ σε άμεσο ηλιακό φως για να αποφευχθεί η μαλάκωσή τους.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε οποιαδήποτε μορφή υγρού.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, είναι φυσιολογικό η θερμοκρασία της συσκευής να αυξάνεται ελαφρώς λόγω των LED φωτιστικών (τα εργαστηριακά δεδομένα δείχνουν μέγιστη θερμοκρασία περίπου 45°C).
- Ο σύνδεσμος παροχής υγρού είναι συμβατός μόνο με σταγόνες αυτιών που πωλούνται στην αγορά. Μην τον χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς. Παρακαλώ συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης και ζητήστε τη γνώμη ενός γιατρού για να διασφαλίσετε την καταλληλότητα.
- Χρησιμοποιήστε τις τσιμπίδες μόνο για να αφαιρέσετε το κερί και άλλα ξένα αντικείμενα από τον ακουστικό πόρο.
- Η λειτουργία αποστείρωσης UVC θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν το προϊόν απενεργοποιηθεί, προκαλώντας την ταχεία αύξηση της θερμοκρασίας της λάμπας UVC του φακού στους 50°-60°C. Αποφύγετε την άμεση έκθεση του δέρματος, ειδικά των ματιών, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποστείρωσης.

## Υπηρεσία Εγγύησης

### Πληροφορίες Πελάτη

Όνομα Πελάτη:

Τηλέφωνο Πελάτη:

Όνομα Λιανοπωλητή:

Διεύθυνση Πελάτη:

## Προειδοποίηση FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων της FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

(1) αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβή παρεμβολή, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Οι αλλαγές ή οι τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων της FCC.

Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ραδιοσυχνότητα ενέργειας και, αν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι παρεμβολές δεν θα συμβούν σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενέργειες:

- Ανακατευθύνετε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

### Δήλωση Έκθεσης Ακτινοβολίας

Η συσκευή έχει αξιολογηθεί ώστε να πληροί τις γενικές απαιτήσεις έκθεσης RF.

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες φορητής έκθεσης χωρίς περιορισμούς.

## ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Black Bees Innovation (HK) Technology Ε.Π.Ε. δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής, Έξυπνη Συσκευή Καθαρισμού Αυτιών, είναι σύμφωνος με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Ο πλήρης κείμενος της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/bebird>

Διεύθυνση παραγωγού: Δωμάτιο 1205, Κτίριο 1, Κτίριο Vanke Xingchen, Οδός Xinqiao, Περιοχή Baoan, Πόλη Shenzhen, Επαρχία Guangdong, Κίνα

Συχνότητα ραδιοφώνου: 2400-2483.5 MHz  
Μέγιστη ισχύς συχνότητας ραδιοφώνου: ≤20dBm

### Προστασία του περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιούμενος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπάγεται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας την ορθή του απόρριψη, αποτρέπεται πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από τον δήμο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών του λεγόμενου Νέου Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση της αρχικής οδηγίας χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης ή υπηρεσίας στην οδηγία χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτή ενός φυσικά νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή υπηρεσίας. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της κατάστασης διαφοράς μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας & Εκπρόσωπος στην ΕΕ: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski Ε.Π.Ε.  
ul. Rudzka 65c  
44-200 Rybnik, Πολωνία  
τηλ. +48 533 234 303  
[hurt@innpro.pl](mailto:hurt@innpro.pl)  
[www.innpro.pl](http://www.innpro.pl)

## Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσεις τη φόρτιση, έλεγξε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Ποτέ μην αφήνεις τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.

Φρόντισε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείς γρήγορα να αποσυνδέσεις τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Ποτέ μην εκθέτεις τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φόρτισε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1μ από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτεις τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μην χρησιμοποιείς τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και την πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Φρόντισε για την περιουσία σας, καθώς η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρίες που είναι δύσκολες να σβηστούν. Προμηθευτείτε μια κουβέρτα πυρόσβεσης.

## Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (λιθίου-ιόντων), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, γερνά με την πάροδο του χρόνου κατά τη διάρκεια της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε σε επίπεδο κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για την μπαταρία, την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που παραλείψετε να χρησιμοποιήσετε την μπαταρία ή ολοκληρή τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε κυκλικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

## Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, γερνά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να αποφορτίζεται κάτω από 3,5V ή 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το κύτταρο, το καταστρέφουν μόνιμα και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί η μπαταρία ή ολοκληρή η συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από έναν μήνα, θα πρέπει να φορτιστεί η μπαταρία στο 50% και να ελέγχεται κυκλικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε τη μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

## Στοιχεία μπαταρίας:

Κατηγορία: Φορητή μπαταρία

Τύπος: Μπαταρία ιόντων λιθίου (Li-ion)

Καθαρό βάρος: 0,0056 kg

Χωρητικότητα: 300 mAh

Υπερβόση της επιτρεπόμενης περιεκτικότητας σε κάδμιο (0,002%) ή μόλυβδο (0,004%): όχι

## Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο οδηγιών. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες πριν από τη χρήση:

### Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος ζημιάς του προϊόντος:

● Μην χρησιμοποιείτε το ωτοσκόπιο σε συνθήκες υψηλής υγρασίας ή σκόνης ή η συσκευή δεν είναι σωστά προστατευμένη.

● Αποφύγετε να βυθίσετε το ωτοσκόπιο στο νερό, εκτός αν ο κατασκευαστής υποδεικνύει διαφορετικά στις προδιαγραφές. Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρύ υγρό πανί για να το καθαρίσετε αν είναι απαραίτητο.

● Αποφύγετε απότομες κινήσεις ή πίεση κατά τη χρήση της συσκευής για να αποφύγετε ζημιές σε ευαίσθητα μηχανικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

● Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση της συσκευής και της μπαταρίας - μην χρησιμοποιείτε ωτοσκόπιο ή καλώδια φόρτισης που είναι κατεστραμμένα ή έχουν ορατά σημάδια φθοράς. Κίνδυνος για τον χρήστη:

● Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κατεστραμμένους ιστούς, πληγές ή φλεγμονές του αυτιού.

● Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες ή υπό την επίβλεψη ενηλίκων, ειδικά για παιδιά.

● Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικές άκρες που παρέχονται από τον κατασκευαστή για να διασφαλίσετε την ασφάλεια και την υγιεινή.

● Σε περίπτωση δυσφορίας ή πόνου κατά τη διάρκεια της χρήσης, σταματήστε τη χρήση της συσκευής και συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

● Για συσκευές που υποστηρίζουν εφαρμογές, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ένα ασφαλές δίκτυο Wi-Fi για να αποφύγετε τους κινδύνους μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

### Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

● Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη ή τροφοδοτείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή πριν από τη χρήση.

● Συνδέστε το ωτοσκόπιο με την εφαρμογή του κατασκευαστή ακολουθώντας τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι το smartphone σας είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή μέσω του δικτύου Wi-Fi του ωτοσκοπίου.

● Χρησιμοποιήστε ειδικές μαλακές άκρες για να εισάγετε απαλά την κάμερα στο αυτί, αποφεύγοντας την πίεση στους τοίχους του ακουστικού πόρου.

● Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής για μεγάλες περιόδους συνεχόμενα - τα τακτικά διαλείμματα μειώνουν τον κίνδυνο ερεθισμού.

● Κρατήστε τη συσκευή σταθερή κατά τη διάρκεια της χρήσης και εισάγετε απαλά την άκρη στο αυτί για να αποφύγετε ζημιά στις εσωτερικές δομές του αυτιού.

● Καθαρίστε τις άκρες μετά από κάθε χρήση σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.

● Διατηρήστε το λογισμικό της εφαρμογής ενημερωμένο για να επωφεληθείτε από τις τελευταίες δυνατότητες και να διασφαλίσετε την βέλτιστη ασφάλεια των δεδομένων.

### Συντήρηση και αποθήκευση:

● Καθαρίστε τη συσκευή μετά τη χρήση και αποθηκεύστε την σε ξηρό και καθαρό μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και υψηλές θερμοκρασίες.

● Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των τερματικών, των καλωδίων και της θήκης για τη συσκευή να τυχόν μηχανικές ζημιές.

● Για τις συσκευές που λειτουργούν με μπαταρία, αποφύγετε την πλήρη εκφόρτιση και την αποθήκευση σε ακραίες θερμοκρασίες.

### Επιπλέον προφυλάξεις

Προσαρμογή στον χρήστη:

● Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει ρυθμιστεί και είναι πλήρως λειτουργική πριν από την πρώτη χρήση.

● Για τα παιδιά, η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικου και οι άκρες να προσαρμόζονται στο ευαίσθητο δέρμα του παιδιού.

Ζημιές και υπηρεσίες:

● Εάν υπάρχουν προβλήματα με τη λειτουργία της κάμερας, παραμόρφωση εικόνας, διακοπή Wi-Fi ή ορατές μηχανικές ζημιές (π.χ., σπασμένες άκρες, ζημιά στη θήκη), διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης του κατασκευαστή.

● Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή για επισκευές και αντικατάσταση εξαρτημάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και να διατηρηθεί η εγγύηση.

### Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Πληρούν τα σχετικά τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, της ασφαλείας χρήσης υλικών και της αντοχής σε μηχανικές και ηλεκτρονικές ζημιές.

E.E. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

Heifeng Zhizao (Shenzhen) Technology Co., E.Π.Ε.

Δωμάτιο 1205, Κτίριο 1, Κτίριο Vanke Xingchen,

Οδός Xingqiao, Περιοχή Μπασάν, Σεντζέν,

Γκουανγκντόνγκ, Κίνα

cs@bebird.com



Heifeng Zhizao (Shenzhen)  
Technology Co., Ε.Π.Ε.

Διεύθυνση γραφείου:  
12ος Όροφος, Κτίριο 1, Vanke  
Xingchen Building, Οδός Xinqiao  
Περιοχή Μπαοαν  
Σεντζέν, Γκουανγκντόνγκ,  
Κίνα

Αριθμός Τηλεφώνου:  
+86 755 27782742

Επίσημη Ιστοσελίδα:  
[www.bebird.com](http://www.bebird.com)

