


Προτεινόμενη απόσταση χειροκίνητης αναγνώρισης: 30 εκ.
(φωτισμός περίπου: 100 λουξ – 1500 λουξ)

Ηλεκτρικός ρινικός αναρροφητήρας

Οδηγίες χρήσης

(για χρήση χωρίς ιατρική συνταγή)

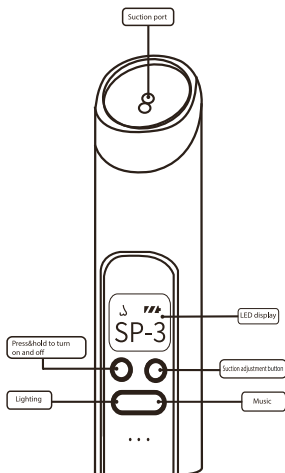

Model BC023

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και λάβετε υπόψη τις προειδοποιήσεις. Παρακαλούμε φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες χρήσης σε ασφαλές μέρος, ώστε να μπορείτε να τις συμβουλευτείτε στο μέλλον.

Αρ. αρχείου: MH002

Έκδοση V1.0

Έκδοση λογισμικού: V1.0

BC023-A-G

Ειλικρινείς ευχαριστίες

Σας ευχαριστούμε θερμά για τις αγορές σας στο κατάστημά μας και για την εμπιστοσύνη που δείξατε στην εταιρεία GROWNSY.

GROWNSY – ο καλύτερος βοηθός των γονέων.

Η GROWNSY δημιουργεί σύγχρονα και μελετημένα προϊόντα για γονείς. Από έξυπνα αξεσουάρ για το τάισμα, η GROWNSY προσφέρει ευρύ φάσμα προϊόντων για κάθε περίπτωση σχετική με γονείς και παιδιά. Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης σειράς προϊόντων για μητέρες και παιδιά.

Υπό το βασικό σύνθημα «δημιουργία ιδανικών προϊόντων που εκφράζουν αγάπη και φροντίδα», η GROWNSY επιδιώκει να επιλύσει τις πιο σύνθετες προκλήσεις κατά την παραγωγή και την παροχή στους χρήστες των πιο άνετων προϊόντων.

Τα προϊόντα της GROWNSY χαρακτηρίζονται από σύγχρονο σχεδιασμό, καινοτόμο κατασκευή και έξυπνη χρήση.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος με το προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

service@grownsy.com

ή στείλτε SMS με το κείμενο GROWNSY στον αριθμό (833)524-0498

Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να επιλύσουμε κάθε πρόβλημα του πελάτη εντός 24 ωρών.

Με εκτίμηση,
Randell
Ιδρυτής της GROWNSY




Περιεχόμενα

1. Περιγραφή προϊόντος	1
2. Στοιχεία του προϊόντος.....	1
3. Σύντομες οδηγίες χρήσης.....	2
4. Φόρτιση και καθαρισμός.....	5
5. Όροι αποθήκευσης.....	9
6. Προδιαγραφές.....	10
7. Προειδοποιήσεις και μέτρα προφύλαξης.....	11
8. Ενδείξεις χρήσης / προορισμός.....	13
9. Αντενδείξεις.....	13
10. Πληροφορίες ασφαλείας.....	13
11. Συντήρηση και ανταλλακτικά.....	15
12. Επίλυση προβλημάτων.....	16
13. Απόρριψη.....	17
14. Κατάλογος περιεχομένων συσκευασίας	17
15. ΕΓΓΥΗΣΗ.....	18
16. Πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα ηλεκτρομαγνητική.....	18
17. Αναφορά ανεπιθύμητων συμβάντων.....	24
18. Δήλωση σχετικά με τη χρήση ή τα ταξίδια διεθνής.....	24
19. Πληροφορίες κατασκευαστή.....	25
20. Εξυπηρέτηση πελατών.....	26

Περιγραφή προϊόντος

Ο Ηλεκτρικός ρινικός αναρροφητήρας είναι μια φορητή συσκευή προ-οριζόμενη για την αναρρόφηση εκκρίσεων από τη μύτη παιδιών ηλικίας από 0 έως 12 ετών. Η κινητήρια αντλία του δημιουργεί υποπίεση που απομακρύνει αποτελεσματικά τις εκκρίσεις από τη μύτη.

Στοιχεία προϊόντος

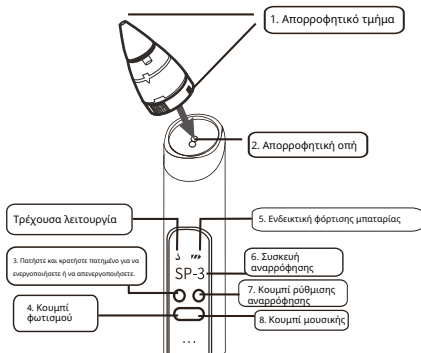

Εικ. 1 Ηλεκτρικός ρινικός αναρροφητήρας

No.	Αντικείμενο	Περιγραφή
1	Απορροφητικό τμήμα	Βοηθητικά αξεσουάρ απορρόφησης
2	Θύρα απορρόφησης	Συνδέεται με το απορροφητικό τμήμα
3	Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης	Κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή
4	Κουμπί φωτισμού	Μια σύντομη πίεση ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το φως
5	Ενδεικτική μπαταρίας	Εμφανίζει το τρέχον επίπεδο φόρτισης
6	Αναρροφητικό σύστημα	Εμφανίζει το τρέχον επίπεδο αναρρόφησης
7	Κουμπί ρύθμισης αναρρόφησης	Ρύθμιση επιπέδου αναρρόφησης
8	Κουμπί μουσικής	Σύντομο πάτημα ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη μουσική και ρυθμίζει την ένταση

Περιγραφή αξεσουάρ



Μικρό κωνικό ακροφύσιο για νεογέννητα



Μεγάλο κωνικό ακροφύσιο για παιδιά άνω των 4 μηνών



Χωνοειδές ακροφύσιο για παιδιά άνω των 4 μηνών, για βαθιά αναρρόφηση ρινικών εκκρίσεων



Καπάκι θάλαμου αναρρόφησης



Λαβή για αναρρόφηση ρινικών εκκρίσεων



Βάση θάλαμου αναρρόφησης



Κουτί για αποθήκευση



Ελαστικός στεγανοποιητικός δακτύλιος

Σχ. 2 Μέρος αναρρόφησης

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι παραπάνω συστάσεις για την επιλογή ακροφυσίου έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Παρακαλείσθε να επιλέξετε το κατάλληλο ακροφύσιο σύμφωνα με το μέγεθος των ρουθουνιών του παιδιού, ώστε να εξασφαλιστεί σωστή στεγανοποίηση χωρίς κενά και να επιτευχθεί η βέλτιστη αναρρόφηση. Εάν το ακροφύσιο είναι πολύ μικρό (π.χ. βλέννες έχουν κολλήσει στο εσωτερικό του ακροφυσίου ή η αναρρόφηση είναι αδύναμη), παρακαλούμε δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ακροφύσιο με μεγαλύτερη οπή. Εάν το ακροφύσιο είναι πολύ μεγάλο (π.χ. δεν είναι δυνατή η στεγανοποίηση της μύτης του παιδιού), αντικαταστήστε το με ακροφύσιο μικρότερης οπής. Εάν το ρινικό έκκριμα βρίσκεται πολύ βαθιά, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ακροφύσιο σε σχήμα χοάνης.

3. Σύντομες οδηγίες χρήσης

3.1.1 Συναρμολόγηση του ηλεκτρικού ρινικού αναρροφητήρα

Βεβαιωθείτε ότι τα μέρη αναρρόφησης έχουν καθαριστεί και απολυμανθεί.




Προσοχή

- Πριν αγγίξετε οποιοδήποτε μέρος του ηλεκτρικού ρινικού αναρροφητήρα, πλύνετε σχολαστικά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό ώστε να αποτρέψετε τη μόλυνση.

Σημειώσεις:

- Η σωστή τοποθέτηση και σύσφιξη της σύνδεσης του ακροφυσίου χοάνης, του θαλάμου συλλογής, της λαβής αναρρόφησης, του στεγανοποιητικού δακτυλίου, της βάσης αναρρόφησης κ.ά. είναι ουσιώδους σημασίας για τη σωστή δημιουργία κενού από τον ηλεκτρικό ρινικό αναρροφητήρα.
- Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε οπτικά τα επιμέρους εξαρτήματα για τυχόν ρωγμές, ξεφλούδισματα, σχισίματα, αποχρωματισμούς ή φθορές. Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε ζημιά, διακόψτε τη χρήση της συσκευής έως ότου αντικατασταθούν τα φθαρμένα μέρη. Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα του ακροφυσίου αναρρόφησης δεν έχουν φθαρεί ή υποστεί ζημιά και αντικαταστήστε τα εάν απαιτείται. Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια σας με νερό και σαπούνι. Στη συνέχεια, συναρμολογήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

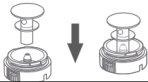
	
1. Φορέστε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο στη βάση αναρρόφησης. (Συνήθως ο στεγανοποιητικός δακτύλιος είναι προεγκατεστημένος).	2. Ευθυγραμμίστε τη λαβή αναρρόφησης με το κέντρο της βάσης και εισαγάγετέ την σταθερά.
	
3. Περιστρέψτε το καπάκι της συλλεκτικής θαλάμης στη βάση αναρρόφησης.	4. Τοποθετήστε το κατάλληλο ακροφύσιο σύμφωνα με τις απαιτήσεις.



5. Συνδέστε το τμήμα αναρρόφησης στη βασική συσκευή: Εισάγετε το συναρμολογημένο τμήμα αναρρόφησης στη θύρα αναρρόφησης της βασικής συσκευής και στη συνέχεια περιστρέψτε το δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει.
Προσοχή: Πριν περιστρέψετε το τμήμα αναρρόφησης, βεβαιωθείτε ότι ο στεγανοποιητικός δακτύλιος στη βάση της αναρρόφησης δεν έχει μετακινηθεί. Εάν αφαιρεθεί ο στεγανοποιητικός δακτύλιος, μπορεί να επηρεαστεί η λειτουργία της αναρρόφησης.

Ο ηλεκτρικός ρινικός αναρροφητήρας είναι πλέον έτοιμος προς χρήση.

3.1.2 Πώς να χειριστείτε τη συσκευή

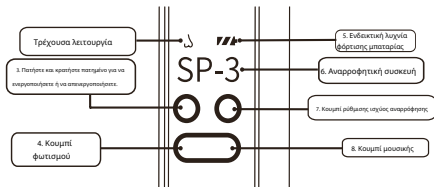

3.1.3 Οδηγίες χρήσης κουμπιών

- 1) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- 2) Η συσκευή διαθέτει τρία επίπεδα ισχύος αναρρόφησης, αυξανόμενα από SP-1 έως SP-3. Μια σύντομη πίεση του κουμπιού εναλλάσσει μεταξύ των επιπέδων ισχύος.
- 3) Φως: σύντομο πάτημα ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το φως, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην απόσπαση της προσοχής του παιδιού.
- 4) Μουσική: ένα σύντομο πάτημα του κουμπιού μουσικής ενεργοποιεί τη μουσική, δεύτερο σύντομο πάτημα αυξάνει την ένταση, ενώ το τρίτο απενεργοποιεί τη μουσική. Η μουσική μπορεί να βοηθήσει στην ηρεμία του παιδιού.
- 5) Η ένδειξη της μπαταρίας αναβοσβήνει όταν το επίπεδο φόρτισης είναι χαμηλό.

3.1.4 Οδηγίες άντλησης

- 1) Κρατήστε το παιδί σε όρθια θέση (εικόνα 3).
- 2) Τοποθετήστε μια καθαρή και στεγνή μύτη στα ρουθούνια του παιδιού, βεβαιώνοντας ότι ο θάλαμος συλλογής βρίσκεται κάτω από το ρουθούνι (εικ. 3).

Προειδοποίηση:

Βεβαιωθείτε ότι η μύτη δεν εισάγεται πολύ βαθιά στη ρινική κοιλότητα και δεν τραυματίζει το εσωτερικό της.



Εικ. 3 Σωστή θέση



Εικ. 4 Λανθασμένη θέση

- 3) Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να ενεργοποιηθεί η συσκευή και να ξεκινήσει η αναρρόφηση.
- 4) Πατήστε σταδιακά το κουμπί ρύθμισης της αναρρόφησης για να προσαρμόσετε το επίπεδο ισχύος της.

Ρύθμιση αναρρόφησης: Υπάρχουν τρία επίπεδα ισχύος αναρρόφησης, που αυξάνονται από SP-1 έως SP-3.

- 5) Επιλογή επιπλέον λειτουργιών (μουσική και φως), προαιρετική.
– Η μουσική είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή και μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί και να ρυθμιστεί πατώντας το κουμπί της μουσικής.
Πατήστε το κουμπί μουσικής για να ενεργοποιήσετε τη μουσική (ένταση: επίπεδο 1), πατήστε ξανά το κουμπί μουσικής για να επιλέξετε ένταση 2, πατήστε το τρίτη φορά για να απενεργοποιήσετε τη μουσική.

Σημείωση: Η ενεργοποίηση της μουσικής μπορεί να βοηθήσει στην απόσπαση της προσοχής του παιδιού και στην ηρεμία του, διευκολύνοντας τη διαδικασία αναρρόφησης.

– Το φως είναι απενεργοποιημένο από προεπιλογή· πατήστε το κουμπί φωτός για να το ενεργοποιήσετε και πατήστε ξανά για να το απενεργοποιήσετε.

Προσοχή: Η ενεργοποίηση του φωτός (που θα αναβοσβήνει διαδοχικά στα χρώματα μπλε, μωβ και κόκκινο) μπορεί να βοηθήσει στην απόσπαση της προσοχής του παιδιού και στην ηρεμία του, διευκολύνοντας τη διαδικασία αναρρόφησης.

6) Κινήστε απαλά τη συσκευή για να καλύψετε όλα τα σημεία του ρουθουνιού. Αυτή η ενέργεια πρέπει να γίνεται προσεκτικά και ήπια ώστε να μην προκαλείται βλάβη στο εσωτερικό της ρινικής κοιλότητας του παιδιού.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η συνιστώμενη διάρκεια αναρρόφησης είναι 10 δευτερόλεπτα ανά ρουθούνι.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Το ξηρό, πολύ πυκνό φλέγμα μπορεί να διαλυθεί με τη χρήση ενός ήπιου διαλύματος φυσιολογικού ορού. Μετά τη χρήση του διαλύματος, περιμένετε μερικά λεπτά, σκουπίστε την περίσσεια με χαρτομάντηλο και, εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε ξανά τον ρινικό αναρροφητήρα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Κατά τη χρήση της συσκευής, κρατήστε τη μύτη αναρρόφησης κοντά στην ρινική κοιλότητα, χωρίς κενά, για να δημιουργηθεί χαμηλή πίεση που εξασφαλίζει αποτελεσματική αναρρόφηση του φλέγματος.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Κατά τη χρήση, παρακολουθείτε συνεχώς τη συλλεκτική δεξαμενή. Πριν γεμίσει ο θάλαμος συλλογής, πρέπει να καθαριστεί από τη βλέννα της μύτης σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στην ενότητα 7.3.

7) Η αναρρόφηση αφαιρεί τη βλέννα από τη μύτη. Επαναλάβετε τη διαδικασία και στο άλλο ρουθούνι αν χρειαστεί.

8) Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ο ρινικός αναρροφητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές την ημέρα. Ο βασικός σας στόχος είναι να εξασφαλίσετε την ανεμπόδιστη αναπνοή του παιδιού. Συνιστάται ο καθαρισμός των αναπνευστικών οδών του παιδιού μετά το ξύπνημα, πριν από τον ύπνο και πριν το τάισμα.



Προσοχή

- Πριν αφαιρέσετε την άκρη από το ρουθούνι, να απενεργοποιείτε πάντα τον ηλεκτρικό ρινικό αναρροφητήρα για να απελευθερωθεί η αρνητική πίεση.
- Εάν το παιδί αισθάνεται έντονη δυσφορία, πρέπει ανά πάσα στιγμή να πατήσετε το κουμπί λειτουργίας για να διακόψετε την αναρρόφηση.

4. Φόρτιση και καθαρισμός

4.1 Φόρτιση μπαταρίας

Πριν από την πρώτη χρήση του προϊόντος, πρέπει να το φορτίσετε.


Ο ηλεκτρικός ρινικός αναρροφητήρας τροφοδοτείται με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη ιόντων λιθίου μπαταρία.

Τα προϊόντα μας παρέχονται με καλώδιο φόρτισης (USB 2.0/

καλώδιο τύπου C), αλλά χωρίς τροφοδοτικό. Πριν από τη φόρτιση, πρέπει να προμηθευτείτε τροφοδοτικό χωριστά. Θα πρέπει να αγοράσετε τροφοδοτικό συμβατό με διεπαφή USB 2.0 και να βεβαιωθείτε ότι η εισερχόμενη τάση του τροφοδοτικού είναι 100–240 V AC 50/60 Hz, ενώ η εξερχόμενη είναι 5 V DC 1 A. Όταν το σύμβολο της μπαταρίας «  » αναβοσβήνει, σημαίνει ότι το επίπεδο φόρτισης είναι χαμηλό. Φορτίστε τη συσκευή εγκαίρως, διαφορετικά η λειτουργία της θα διακοπεί μετά από περίπου 1 λεπτό.

Φορτίστε την μπαταρία ως εξής:

- α. Συνδέστε την άκρη USB του καλωδίου φόρτισης στη θύρα USB του τροφοδοτικού.
- β. Συνδέστε το φις του τροφοδοτικού στην πρίζα ρεύματος.
- γ. Συνδέστε την άκρη τύπου C του καλωδίου φόρτισης στη θύρα φόρτισης.

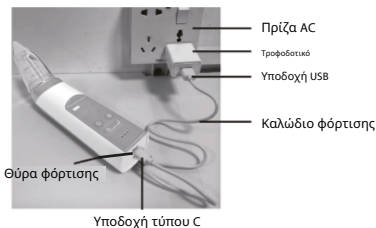

Η πλήρης φόρτιση της συσκευής διαρκεί περίπου 1,5 ώρα. Κατά τη φόρτιση, το σύμβολο της μπαταρίας θα αναβοσβήνει για να υποδείξει την κατάσταση. Μετά την πλήρη φόρτιση, το σύμβολο της μπαταρίας θα παραμένει σταθερά αναμμένο με λευκό χρώμα χωρίς αναλαμπές. Μετά το τέλος της φόρτισης, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα και αφαιρέστε το καλώδιο φόρτισης τόσο από το τροφοδοτικό όσο και από τη βασική συσκευή.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην χρησιμοποιείτε τον ηλεκτρικό ρινικό αναρροφητήρα κατά τη διάρκεια της φόρτισης!
- Το καλώδιο φόρτισης προορίζεται αποκλειστικά για τη σύνδεση του τροφοδοτικού με την ηλεκτρική αντλία για τους σκοπούς φόρτισης. Μην το συνδέετε με άλλες συσκευές, καθώς μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία!
- Εάν το τροφοδοτικό χαλαρώσει, αποσυνδεθεί ή φθαρεί, σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του τροφοδοτικού.

- Εάν το καλώδιο φόρτισης είναι κατεστραμμένο, σχισμένο ή ραγισμένο, σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για ανταλλακτικό (τα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στην τελευταία σελίδα αυτού του εγχειριδίου).
- Η χρήση της συσκευής πρέπει να διακοπεί αμέσως εάν παρατηρήσετε καπνό ή οσμή καμένου που προέρχεται από την αντλία ή το τροφοδοτικό.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Η χρήση ακατάλληλου τύπου τροφοδοτικού ή η αγορά τροφοδοτικού χαμηλής ποιότητας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευής, να προκαλέσει ζημιά στην περιουσία και να απειλήσει την υγεία. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι το αγορασθέν τροφοδοτικό προορίζεται για ιατρική χρήση, πληροί τα πρότυπα IEC 60601-1 και IEC 60601-1-2, προέρχεται από την επαγγελματική αγορά ιατρικών συσκευών και διαθέτει έξοδο DC 5V 1A.

Σημειώσεις:

- Η μπαταρία μπορεί συνήθως να φορτιστεί περίπου 300 φορές.
- Μετά από πλήρη φόρτιση, η μπαταρία παρέχει συνήθως 70-80 λεπτά λειτουργίας.
- Εάν μετά από πλήρη φόρτιση ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας μειώνεται σε σύγκριση με πριν και επιθυμείτε να την αντικαταστήσετε, μην προσπαθήσετε να την αντικαταστήσετε μόνοι σας. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για την αντικατάσταση, καθώς η αποσυναρμολόγηση και αντικατάσταση της μπαταρίας από τον χρήστη μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον ελεγκτή και στην ίδια την μπαταρία.
- Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η μπαταρία αποφορτίζεται σταδιακά. Για να αποφύγετε βλάβη στην μπαταρία λόγω παρατεταμένης χαμηλής τάσης, φορτίζετε τη συσκευή κάθε τρεις μήνες.

4.2 Καθαρισμός και απολύμανση

Μετά από κάθε χρήση, η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται και/ή να απολυμαίνεται αμέσως.


- Πριν από την πρώτη χρήση του ηλεκτρικού ρινικού αναρροφητήρα και μετά από κάθε χρήση, πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται όλα τα τμήματα αναρρόφησης (δηλαδή το ακροφύσιο χοάνης, η θήκη συλλογής, η λαβή αναρρόφησης, ο στεγανοποιητικός δακτύλιος και η βάση αναρρόφησης).
- Μετά από κάθε χρήση, πρέπει να καθαρίζεται η κύρια μονάδα.

4.2.1 Καθαρίστε και απολυμάνετε το τμήμα αναρρόφησης.

Πριν από τον καθαρισμό και/ή την απολύμανση:

Πλύντε τα χέρια σας καλά με σαπούνι και νερό για 20 δευτερόλεπτα.

Βήμα 1: Αποσυνδέστε το τμήμα αναρρόφησης από την κύρια συσκευή (εικ. 5) και στη συνέχεια αποσυναρμολογήστε όλα τα μέρη του τμήματος αναρρόφησης (εικ. 6). Αποσυναρμολογήστε με αντίστροφη σειρά από αυτήν της συναρμολόγησης.

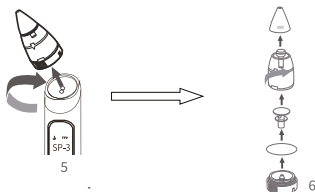

Βήμα 2: Καθαρισμός

Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται στο χέρι! Δεν έχει επιβεβαιωθεί η ασφάλεια χρήσης πλυντηρίου πιάτων για τον καθαρισμό και την απολύμανση αυτού του προϊόντος.

1. Ετοιμάστε τα ακόλουθα αντικείμενα:

- Σαπούνι και ζεστό νερό βρύσης
- Νερό πόσιμο
- Καθαρό νιπτήρα
- Καθαρή βούρτσα και βαμβάκι
- Αχρησιμοποίητο σφουγγάρι κουζίνας ή χαρτοπετσέτα

2. Ξέπλυμα: Ξεπλύνετε τα τμήματα αναρρόφησης κρατώντας τα κάτω από τρεχούμενο νερό για να αφαιρέσετε υπολείμματα βλέννας ή βρωμιάς.

3. Πλύσιμο των τμημάτων αναρρόφησης:

Τοποθετήστε τα τμήματα αναρρόφησης σε καθαρό νεροχύτη με ζεστό νερό και προσθέστε σαπούνι. Τρίψτε τα εξαρτήματα με μια καθαρή βούρτσα (το εσωτερικό μπορεί να καθαριστεί με βαμβάκοφόρο στυλεό), μέχρι να μην υπάρχουν ορατοί ρύποι.

4. Ξεβγάλετε ξανά: Ξεπλύνετε τα εξαρτήματα κάτω από τρεχούμενο ζεστό νερό για 3 λεπτά.

5. Αφήστε τα να στεγνώσουν φυσικά στον αέρα: Τοποθετήστε τα αξεσουάρ των τμημάτων αναρρόφησης σε καθαρή, αχρησιμοποίητη πετσέτα κουζίνας ή χαρτί κουζίνας, σε χώρο προστατευμένο από βρωμιά και σκόνη.

Βήμα 3: Απολύμανση

Πριν την απολύμανση, βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει τα αξεσουάρ των τμημάτων αναρρόφησης με τις παραπάνω μεθόδους. Απολυμάνετε όλα τα μέρη των τμημάτων αναρρόφησης εφαρμόζοντας την παρακάτω μέθοδο.

1. Προετοιμάστε τα παρακάτω αντικείμενα:

- Οικιακή κατασρόλα
- Πόσιμο νερό
- Καθαρά τσιμπιδάκια

2. Τοποθετήστε το αποσυναρμολογημένο τμήμα αναρρόφησης στην κατασρόλα και γεμίστε την με νερό, έτσι ώστε

ώστε να καλύπτει όλα τα εξαρτήματα που προορίζονται για αποστείρωση. Βράστε το νερό για 5 λεπτά, φροντίζοντας ώστε τα εξαρτήματα να μην ακουμπούν στα τοιχώματα του δοχείου.

3. Αφαιρέστε τα εξαρτήματα χρησιμοποιώντας καθαρά τσιμπιδάκια.

4. Αφήστε τα να στεγνώσουν πλήρως στον αέρα.

Βήμα 4: ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα στεγνά εξαρτήματα πρέπει να αποθηκεύονται σε δοχεία αποθήκευσης έως ότου χρειαστούν. Πριν από την αποθήκευση, βεβαιωθείτε ότι τα καθαρά εξαρτήματα έχουν στεγνώσει πλήρως στον αέρα. Τα στεγνά εξαρτήματα πρέπει να αποθηκεύονται σε καθαρό, προστατευμένο χώρο ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση.

1) Πλύνετε τα χέρια σας: Καθαρίστε τα σχολαστικά με νερό και σαπούνι.

2) Συναρμολόγηση: Συναρμολογήστε τα καθαρά, στεγνά τμήματα αναρρόφησης.

3) Φυλάξτε σε ασφαλές μέρος: Τοποθετήστε το συναρμολογημένο τμήμα αναρρόφησης σε καθαρό και προστατευμένο χώρο, π.χ. σε κλειστή ντουλάπα κουζίνας που προορίζεται αποκλειστικά για την φύλαξη καθαρών σκευών.

4.2.2 Καθαρισμός της κύριας συσκευής.

Προετοιμάστε τα παρακάτω αντικείμενα:

- Απολυμαντικό

- Μαντηλάκια εμποτισμένα με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη

- Καθαρό, μαλακό πανί και καθαρό βαμβάκι

1) Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό, πλύνετε τα χέρια σας με απολυμαντικό.

2) Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα ξένων ουσιών από την επιφάνεια της κύριας συσκευής με ένα καθαρό, απαλό πανί.

Καθαρίστε την εισροή της κύριας συσκευής με ένα βαμβακερό επίθεμα.

3) Πάρτε ένα μαντηλάκι εμποτισμένο με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη και καθαρίστε την επιφάνεια της συσκευής μέχρι να μην υπάρχουν ορατές ακαθαρσίες. Στη συνέχεια, πάρτε ένα βαμβακερό επίθεμα εμποτισμένο με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη και καθαρίστε την είσοδο αναρρόφησης της κύριας συσκευής μέχρι να μην υπάρχουν ορατές ακαθαρσίες.

4) Αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει σε θερμοκρασία δωματίου για 10 λεπτά, ώστε να εξατμιστούν τυχόν υπολείμματα διαλύματος καθαριστικού από το προϊόν.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Ποτέ μην βυθίζετε την κύρια συσκευή στο νερό ή στο πλυντήριο πιάτων, καθώς αυτό θα προκαλέσει μόνιμη βλάβη στα μέρη αυτά. Μην χρησιμοποιείτε αντιβακτηριδικά ή λειαντικά μέσα για τον καθαρισμό των εξαρτημάτων του ηλεκτρικού ρινικού αναρροφητήρα, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.

5. Όροι αποθήκευσης

Μην εκθέτετε τον ηλεκτρικό ρινικό αναρροφητήρα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Αποθηκεύετε τον ηλεκτρικό ρινικό αναρροφητήρα και τα αξεσουάρ του σε ασφαλές, καθαρό και ξηρό μέρος, σύμφωνα με τις οδηγίες μεταφοράς και αποθήκευσης που αναφέρονται στην ενότητα 9.

Εάν η συσκευή έχει αποθηκευτεί σε θερμό ή ψυχρό περιβάλλον, πριν από τη χρήση, αφήστε την σε θερμοκρασία 20°C για 30 λεπτά, ώστε να φτάσει σε θερμοκρασία κατάλληλη για χρήση (από 5°C έως 40°C).

Προδιαγραφές

Αριθμός μοντέλου	BC023
Όνομα	Ηλεκτρικός ρινικός αναρροφητήρας
Είσοδος φόρτισης	DC 5 V 1,0 A (φόρτιση με το παρεχόμενο καλώδιο USB 2.0/Type-C και ανεξάρτητα αγορασμένο τροφοδοτικό)
Τροφοδοσία	Λιθιοϊονική μπαταρία DC 3,7 V/700 mAh
Ονομαστική ισχύς	2.2W
Εύρος κενού	52 έως 60 kPa (σφάλμα: +2 kPa)
Επίπεδο θορύβου	< 80dBA
Διαστάσεις ακροφυσίου(ψ)	OD4.3/ID2.4
Διαστάσεις συσκευής	195MM*41MM*35MM
Βάρος (με όλα τα αξεσουάρ)	306±5g
Τύπος κινητήρα	DC 3.7V
Υλικά	Υλικό ABS + PP κατάλληλο για τρόφιμα
Πιστοποίηση	FCC, CE, ROHS, REACH, WEEE, LFGB Κατασκευάστηκε στην Κίνα
Διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα (δηλαδή ο χρόνος λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας και όλων των αξεσουάρ)	2 έτη (Η διάρκεια ζωής αυτής της συσκευής, που είναι 2 έτη, υπολογίστηκε ως εξής: κάθε συνεδρία αναρρόφησης διαρκεί 20 δευτερόλεπτα (10 δευτερόλεπτα για κάθε ρουθούνι), και ο χρήστης χρησιμοποιεί τη συσκευή 24 φορές την ημέρα).

Τύπος προστασίας από ηλεκτροπληξία	Συσκευές με εσωτερική τροφοδοσία κατηγορίας II
Βαθμός προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας	Τμήμα εφαρμογής τύπου BF (Απορροφητικό τμήμα)
Λειτουργία	Συνεχής λειτουργία
Όροι λειτουργίας	Θερμοκρασία: από 5°C έως 40°C· Υγρασία: από 15% έως 93%, Ατμοσφαιρική πίεση: από 70 kPa έως 106 kPa
Μεταφορά και συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: από -10°C έως 70°C· Υγρασία: από 10% έως 95%, Ατμοσφαιρική πίεση: από 70 kPa έως 106 kPa

7. Οδηγίες προειδοποίησης και μέτρα προφύλαξης

Τα προειδοποιητικά σήματα και τα γραφικά σύμβολα που περιλαμβάνονται στην παρούσα οδηγία έχουν σκοπό να διασφαλίσουν την ασφαλή και ορθή χρήση του προϊόντος, καθώς και την αποτροπή τραυματισμών του χρήστη και τρίτων. Τα προειδοποιητικά σήματα και τα γραφικά σύμβολα περιγράφονται παρακάτω:

Σύμβολα προειδοποίησης / μέτρα προφύλαξης	
 Προειδοποίηση	Η προειδοποίηση ενημερώνει τον αναγνώστη για μια κατάσταση που, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς. Μπορεί επίσης να περιγράψει πιθανά σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα και κινδύνους για την ασφάλεια.
 Μέτρα προφύλαξης	Αναφέρεται σε προειδοποίηση κινδύνου που ενημερώνει τον αναγνώστη για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση που, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει μικρούς ή μέτριους τραυματισμούς στον χρήστη ή τον ασθενή ή ζημιά στον εξοπλισμό ή σε άλλη περιουσία. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την προειδοποίηση σχετικά με επικίνδυνες πρακτικές. Περιλαμβάνει την ιδιαίτερη προσοχή που απαιτείται για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση της συσκευής, καθώς και την προσοχή που χρειάζεται για την αποφυγή ζημιάς στη συσκευή που μπορεί να προκύψει από τη χρήση ή την κακή χρήση αυτής.

Αντενδείξεις	Οι αντενδείξεις είναι καταστάσεις κατά τις οποίες η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, καθώς ο κίνδυνος από τη χρήση της υπερβαίνει σαφώς τα πιθανά οφέλη. Υπάρχουν άτομα για τα οποία η χρήση της συσκευής δεν ενδείκνυται, λόγω της κατάστασης της υγείας τους.
Σημειώσεις	Υποδηλώνουν την ανάγκη προσοχής, καθώς η παρά λειψή της μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη χρήση του προϊόντος ή φθορά της συσκευής.

Περιγραφή συμβόλων

	Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται κατακόρυφα προς τα πάνω.
	Μέρος τύπου BF
	Κωδικός παρτίδας
	Πληροφορίες κατασκευαστή: Όνομα και διεύθυνση κατασκευαστή
	Φυλάσσετε σε ξηρό μέρος
IP22	Πρώτος αριθμός 2: Προστασία από στερεά σώματα διαμέτρου 12,5 mm και άνω. Δεύτερος αριθμός 2: Προστασία από κατακόρυφες σταγόνες νερού κατά την κλίση του περιβλήματος έως 150° (σταγόνες νερού μπορεί να εισέλθουν στο προϊόν χωρίς να επηρεάζεται η βασική ασφάλεια και λειτουργία, αλλά ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργικότητα του προϊόντος).
	Απόρριψη σύμφωνα με την οδηγία 2002/96/EK (WEEE)
	Η συσκευή αυτή δεν έχει δοκιμαστεί για χρήση σε περιβάλλον MR και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον MR όταν οι ασθενείς τη φέρουν. Πρέπει να αποθηκεύεται εκτός του χώρου όπου βρίσκεται ο σαρωτής MRI.

	Όριο στοίβας 5 στρώσεων
	Τύπος προστασίας κατά του ηλεκτροπληξίας: Κλάση II
	Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
	Ημερομηνία κατασκευής

8. Ενδείξεις χρήσης / προορισμός

[Ενδείξεις χρήσης/Προορισμός]

Ο ηλεκτρικός ρινικός αναρροφητήρας προορίζεται για περιοδική απομάκρυνση ρινικών εκκρίσεων και βλέννας σε παιδιά ηλικίας από 0 έως 12 ετών. Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση.

[Προβλεπόμενοι χρήστες]

Ο προβλεπόμενος χρήστης είναι ενήλικας με τουλάχιστον 8 χρόνια εμπειρίας στην εκτενή ανάγνωση και είναι ικανός να διαβάσει και να κατανοήσει το εγχειρίδιο χρήσης.

9. Αντενδείξεις

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ο ρινικός αναρροφητήρας εάν το παιδί έχει τις ακόλουθες αντενδείξεις:

- Ρινική αιμορραγία
- Οξείες κακώσεις κεφαλής, προσώπου ή τραχήλου
- Διαταραχές της πήξης ή διαταραχές της αιμόστασης

10. Πληροφορίες ασφαλείας

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών προϊόντων, ειδικά παρουσία παιδιών, πρέπει πάντα να τηρούνται οι παρακάτω βασικοί κανόνες ασφαλείας.



Προειδοποίηση

1) Αποφύγετε τις ακόλουθες λανθασμένες ενέργειες, καθώς μπορεί να προκαλέσουν μηχανικούς τραυματισμούς, ερεθισμό ή αιμορραγία από τη μύτη, αιμορραγία του βλεννογόνου, δυσφορία και πόνο:

- Μην εισάγετε ποτέ τον αναρροφητήρα πολύ βαθιά στο ρουθούνι.
- Μην πιέζετε ποτέ τη μύτη του ακροφυσίου δυνατά στο εσωτερικό τοίχωμα του ρουθουνιού.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην εισάγετε δυνατά το ακροφύσιο του αναρροφητήρα στη ρινική κοιλότητα, τοποθετήστε το απαλά.
- ΜΗΝ τη χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ στα αυτιά, το στόμα ή τα μάτια.

2) Αυτός ο ρινικός αναρροφητήρας προορίζεται αποκλειστικά για την αφαίρεση εκκρίσεων από τη μύτη.

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς πέραν των προβλεπόμενων.

3) Εάν το παιδί αισθανθεί δυσφορία κατά τη χρήση της συσκευής, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε ιατρό.

4) Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Σε περίπτωση ρινικών παθήσεων, συμβουλευτείτε ιατρό.

5) Το απορροφητικό τμήμα πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση.

6) Μην χρησιμοποιείτε τον αναρροφητήρα εάν είναι κατεστραμμένος, καθώς η χρήση μιας κατεστραμμένης συσκευής μπορεί να προκαλέσει σωματικούς τραυματισμούς ή σοβαρό κίνδυνο.

7) Αυτός ο ηλεκτρικός ρινικός αναρροφητήρας δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης.

8) Κίνδυνος: Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:

- Αποσυνδέετε πάντα τις συσκευές από την τροφοδοσία μετά το τέλος της φόρτισης.
- Μην χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια του μπάνιου, του ντους, της οδήγησης ή της κολύμβησης.
- Μην αγγίζετε ηλεκτρικό προϊόν που έχει πέσει στο νερό. Αποσυνδέστε αμέσως το τροφοδοτικό από την πρίζα του τοίχου.

9) Ο ηλεκτρικός ρινικός αναρροφητήρας αποτελεί προϊόν προσωπικής υγιεινής και για λόγους υγιεινής δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα του ενός παιδιά.

10) Κατά τη χρήση του προϊόντος κοντά σε παιδιά, απαιτείται αυστηρή επίβλεψη. Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή κατοικίδια να παίζουν με τη συσκευή, τη συσκευασία ή τα αξεσουάρ.

11) Μην χρησιμοποιείτε άλλα εξαρτήματα ή στοιχεία (όπως το απορροφητικό τμήμα ή το καλώδιο φόρτισης) εκτός από εκείνα που προτείνει ο κατασκευαστής.

12) Πριν από τη φόρτιση, ελέγξτε το τροφοδοτικό· μην χρησιμοποιείτε ποτέ φθαρμένο τροφοδοτικό.

13) Κρατήστε το προϊόν και όλα τα ακροφύσια μακριά από θερμές επιφάνειες.

14) Μην το χρησιμοποιείτε ποτέ κατά τη διάρκεια του ύπνου ή σε κατάσταση υπνηλίας.

15) Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά, σε περιβάλλον MRI, σε υπερβαρικό θάλαμο ή κοντά σε τζάκι ή θερμαντικό σώμα.

16) Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να επισκευάζουν το προϊόν μόνοι τους. Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση αυτοεπισκευής.

Για επισκευές, παρακαλείσθε να αποστέλλετε το προϊόν στον κατασκευαστή ή στον ορισμένο διανομέα franchise.

17) Πριν αφαιρέσετε τη συσκευή από τα ρουθούνια, πρέπει πάντα να σταματάτε την αναρρόφηση για να απελευθερωθεί η αρνητική πίεση.

18) Σε περίπτωση εμφάνισης ερεθισμού ή δυσφορίας, διακόψτε τη χρήση και συμβουλευτείτε ιατρό.

19) Μην τοποθετείτε τη συσκευή με τρόπο που να δυσκολεύει τη λειτουργία της συσκευής αποσύνδεσης.

20) Διάρκεια ζωής προϊόντος (δηλαδή, περίοδος χρήσης)

Η συσκευή δεν έχει καθορισμένη ημερομηνία λήξης, και η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι δύο χρόνια. Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε αν το προϊόν λειτουργεί σωστά. Η χρήση του προϊόντος μετά τη λήξη της περιόδου χρήσης μπορεί να προκαλέσει μείωση της απόδοσής του. Για παράδειγμα, εάν το προϊόν δεν ελέγχει σωστά το κενό, η υπερβολική αρνητική πίεση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.



Μέτρα προφύλαξης:

- Εάν εμφανιστεί ερυθρότητα στο δέρμα της μύτης του παιδιού, συμβουλευτείτε τον ιατρό, ο οποίος θα σας καθοδηγήσει σχετικά με το πότε και τη συχνότητα καθαρισμού της μύτης του παιδιού.
- Μην βυθίζετε ούτε πετάτε το προϊόν σε νερό ή σε άλλο υγρό.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε υγρά και μην την εκθέτετε σε ισχυρούς κραδασμούς, όπως πτώση.
- Κατά τη χρήση του προϊόντος, το παιδί δεν πρέπει να κρατά την αναπνοή, να κλείνει το στόμα ή να καταπίνει το σάλιο, προκειμένου να αποφευχθεί η διαταραχή της ισορροπίας του τυμπάνου εξαιτίας της αρνητικής πίεσης.
- Εάν η λειτουργία του προϊόντος αλλάξει, θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση του και να ακολουθήσετε τις οδηγίες της παραγράφου 11 «Επίλυση προβλημάτων» σε αυτό το εγχειρίδιο. Εάν το πρόβλημα παραμείνει άλυτο, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή. Τα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στην τελευταία σελίδα αυτού του εγχειριδίου.

Σημειώσεις:

Αποφύγετε την άμεση έκθεση της κύριας συσκευής στο ηλιακό φως.

11. Συντήρηση και ανταλλακτικά

Η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη· το άνοιγμα ή η χειρισμός της συσκευής θα οδηγήσει σε απώλεια της εγγύησης. Σε περίπτωση ανάγκης επισκευής, η συσκευή πρέπει να επιστραφεί απευθείας στην εταιρεία κατασκευής ιατρικού εξοπλισμού ή στον πωλητή. Απαγορεύονται όλες οι τροποποιήσεις.

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ παρέχει κατόπιν αιτήματος διαγράμματα κυκλωμάτων, λίστες εξαρτημάτων, περιγραφές, οδηγίες βαθμονόμησης ή άλλες πληροφορίες που διευκολύνουν το ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ στην επισκευή των τμημάτων της συσκευής που έχουν δηλωθεί από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ως επισκευάσιμα από το ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η μπαταρία αποφορτίζεται σταδιακά. Για να αποφύγετε βλάβη στην μπαταρία λόγω παρατεταμένης χαμηλής τάσης, φορτίζετε τη συσκευή κάθε τρεις μήνες.



Προειδοποίηση: η αντικατάσταση των μπαταριών λιθίου από μη κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό μπορεί να αποτελεί κίνδυνο. Μην καθαρίζετε, απολυμαίνετε ή συντηρείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της χρήσης της.

12. Επίλυση προβλημάτων

Προβλήματα	Αιτίες και λύσεις
1. Μετά το πάτημα του κουμπιού, η συσκευή δεν ανταποκρίνεται.	Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό, παρακαλούμε φορτίστε την.
2. Το προϊόν δεν αναρροφά ή η ένταση της αναρρόφησης είναι πολύ χαμηλή.	1) Τα τμήματα δεν είναι σωστά συναρμολογημένα, γεγονός που μπορεί να προκαλεί διαρροές. 2) Η απόρροφητική μύτη ενδέχεται να μην είναι τοποθετημένη αρκετά κοντά στην ρινική κοιλότητα, αφήνοντας κενό που εμποδίζει το σωστό σχηματισμό υποπίεσης. Επανατοποθετήστε την απόρροφητική μύτη ώστε να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά τοποθετημένη στη ρινική κοιλότητα. 3) Τα τμήματα δεν είναι στεγανά τοποθετημένα. Βεβαιωθείτε ότι το απορροφητικό τμήμα είναι σφικτά συνδεδεμένο με τη βασική μονάδα και ότι όλα τα αξεσουάρ των τμημάτων αναρρόφησης είναι στερεά τοποθετημένα.
3. Η ισχύς αναρρόφησης του ηλεκτρικού ρινικού αναρροφητήρα είναι υπερβολικά υψηλή.	1) Κατά την πρώτη χρήση της συσκευής, ξεκινήστε από το χαμηλότερο επίπεδο αναρρόφησης (διαθέσιμα τρία επίπεδα) και αυξήστε το σταδιακά, ώστε να βρείτε το επίπεδο που σας ταιριάζει καλύτερα. τον εαυτό σας. 2) Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα αξεσουάρ αναρρόφησης που παρέχονται με τον ηλεκτρικό ρινικό αναρροφητήρα.

Εάν οι παραπάνω μέθοδοι δεν επιλύουν το πρόβλημα με τη συσκευή, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή. Τα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στην τελευταία σελίδα.

13. Απόρριψη



Μετά το πέρας του κύκλου ζωής του προϊόντος, μην το απορρίπτετε μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε το σε σημεία συλλογής ηλεκτρονικού εξοπλισμού και μπαταριών για ανακύκλωση.

Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (WEEE) μπορεί να έχει ενδεχομένως επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η ακατάλληλη απόρριψη μπορεί να οδηγήσει στη συσσώρευση επιβλαβών τοξινών στον αέρα, το νερό και το έδαφος, γεγονός που βλάπτει την ανθρώπινη υγεία. Ο χρήστης οφείλει να προβεί στην ορθή απόρριψη της συσκευής. Πληροφορίες για την απόρριψη διατίθενται από τις τοπικές αρχές.

14. Τιμολόγιο αποστολής

No.	Όνομα		Ποσότητα
1	Κύριο τμήμα		1
2	Απορροφητικό τμήμα	Μικρό κωνικό ακροφύσιο για νεογνά	1
3		Μεγάλο κωνικό ακροφύσιο ανοίγματος για παιδιά άνω των 4 μηνών	1
4		Χωνοειδές ακροφύσιο για παιδιά άνω των 4 μηνών, για βαθιά αναρρόφηση ρι- νικών εκκρίσεων	1
5		Θάλαμος συλλογής	1
6		Λαβή αναρρόφησης	1
7		Στεγανοποιητικός δακτύλιος	1
8		Βάση αναρρόφησης	1
9	Κουτί αποθήκευσης (αποθηκεύετε τα αξε- σουάρ και τα τμήματα αναρρόφησης)		1
10	Γραμμή φόρτισης		1
11	Οδηγίες χρήσης		1

15. ΕΓΓΥΗΣΗ

Σε περίπτωση εγγυητικής απαίτησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον διανομέα. Εάν είναι απαραίτητη η αποστολή της συσκευής, παρακαλούμε να επισυνάψετε αντίγραφο αποδείξεως μαζί με ακριβή περιγραφή της βλάβης.

1. Η εγγύηση της συσκευής ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση εγγύησης, η ημερομηνία αγοράς πρέπει να επιβεβαιωθεί με απόδειξη ή τιμολόγιο.

2. Οι επισκευές στο πλαίσιο της εγγύησης δεν παρατείνουν την περίοδο εγγύησης ούτε για τη συσκευή ούτε για τα ανταλλακτικά.

3. Από την εγγύηση αποκλείονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

- Όλες οι ζημιές που προκύπτουν από κακή χρήση, π.χ. από μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.
- Οποιοσδήποτε ζημιές που προκύπτουν από κακή χρήση, π.χ. από μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.
- Ζημιές που προκύπτουν από επισκευές ή παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον πελάτη ή μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα.
- Ζημιές που προέκυψαν κατά τη μεταφορά από τον κατασκευαστή ή προς το κέντρο σέρβις.
- Αξεσουάρ που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά.
- Βλάβες της συσκευής που προκλήθηκαν από αποσυναρμολόγηση από τον καταναλωτή.

4. Αποκλείεται η ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες επακόλουθες ζημιές που προκλήθηκαν από τη συσκευή, ακόμη και αν η βλάβη της συσκευής αναγνωριστεί ως καλυπτόμενη από την εγγύηση.

16. Πληροφορίες σχετικά με το EMC

Δήλωση:

Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακό περιβάλλον φροντίδας υγείας και έχει σχεδιαστεί ώστε να πληροί τις ακόλουθες ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ.

Βασική απόδοση:

Διεξαγωγή δοκιμών EMC βάσει των ακόλουθων απαιτήσεων βασικής απόδοσης:

Συγκεκριμένη λειτουργία για τη συσκευή	Κριτήρια θετικού/αρνητικού αποτελέσματος για τις επιμέρους συσκευές	Μέθοδος ανίχνευσης/δοκιμής
Εύρος κενού	52 έως 60 kPa (σφάλμα: +2 kPa)	Παρακολούθηση του μανόμετρου υποπίεσης

Εάν η απαιτούμενη απόδοση χαθεί ή επιδεινωθεί λόγω ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, αυτό μπορεί να προκαλέσει απώλεια της λειτουργίας του προϊόντος ή τραυματισμό των ασθενών. Για την αποφυγή πιθανών ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω σημαντικές πληροφορίες πριν από τη χρήση.

Προσοχή

- Η χρήση κινητού τηλεφώνου ή φούρνου μικροκυμάτων, η λειτουργία χειρουργικού εξοπλισμού υψηλής συχνότητας (HF), συσκευής μαγνητικού συντονισμού (MRI) ή άλλου εξοπλισμού που εκπέμπει ραδιοκύματα (RF) κοντά σε αυτό το προϊόν, ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του.
- Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση αυτού του εξοπλισμού κοντά ή σε συνδυασμό με άλλον εξοπλισμό, καθώς μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία. Εάν η χρήση σε τέτοια περίπτωση είναι αναγκαία, πρέπει να παρακολουθείται τόσο ο συγκεκριμένος εξοπλισμός όσο και ο άλλος, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους.
- Φορητός ραδιοσυχνотικός εξοπλισμός επικοινωνίας RF (συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών συσκευών, όπως τα καλώδια κεραιών και οι εξωτερικές κεραίες) δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε απόσταση μικρότερη των 30 cm (12 ιντσών) από οποιοδήποτε τμήμα του ηλεκτρικού ρινικού αναρροφητήρα, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων που καθορίζει ο κατασκευαστής. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί επιδείνωση της λειτουργίας αυτού του εξοπλισμού.
- Η χρήση αξεσουάρ, μετατροπών και καλωδίων διαφορετικών από αυτά που ορίζει ή παρέχει ο κατασκευαστής αυτής της συσκευής μπορεί να αυξήσει τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές ή να μειώσει την ηλεκτρομαγνητική αντοχή της συσκευής, οδηγώντας σε δυσλειτουργία.

Προσοχή

1) Συσκευές ασφαλείας, αντικλεπτικές και αναγνωριστικές που χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες (RFID). Ορισμένα ηλεκτρομαγνητικά αντικλεπτικά συστήματα και ανιχνευτές μετάλλων, όπως αυτά που υπάρχουν σε εισόδους ή εξόδους πολυκαταστημάτων, βιβλιοθηκών και άλλων δημόσιων χώρων, καθώς και οι συσκευές ελέγχου ασφαλείας σε αεροδρόμια, μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του ηλεκτρικού ρινικού αναρροφητήρα. Αποφύγετε τη χρήση του ηλεκτρικού ρινικού αναρροφητήρα σε αυτούς τους χώρους. Επιπλέον, οι συσκευές RFID που χρησιμοποιούνται συχνά για την ανάγνωση ταυτοτήτων, καθώς και ορισμένες συσκευές απενεργοποίησης ετικετών, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται στα ταμεία καταστημάτων και στις δανειστικές υπηρεσίες βιβλιοθηκών, μπορεί επίσης να επηρεάσουν τη λειτουργία του ηλεκτρικού ρινικού αναρροφητήρα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ο ηλεκτρικός ρινικός αναρροφητήρας κοντά σε αυτούς τους χώρους. Εάν χρειαστεί να περάσετε από μία από αυτές τις συσκευές, απενεργοποιήστε τον ηλεκτρικό ρινικό αναρροφητήρα. Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε την κατάσταση του ηλεκτρικού ρινικού αναρροφητήρα για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.

2) Η χρήση βραχυκυμάτων, μικροκυμάτων ή θεραπευτικής υπερηχητικής διαθερμίας (όλες σήμερα αναφερόμενες ως διαθερμία) και συσκευών ηλεκτροπηξίας κοντά σε αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει ακατάλληλη λειτουργία ή απώλεια απόδοσης, γι' αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ο ηλεκτρικός ρινικός αναρροφητήρας κοντά σε αυτές τις συσκευές.

Παρακάτω παρέχεται λίστα καλωδίων μαζί με το μέγιστο μήκος τους:

Ονομασία καλωδίων	Μήκος καλωδίου	Παρέχουν προστασία;
Καλώδιο φόρτισης	500±30mm	Όχι

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές

Ο ηλεκτρικός ρινικός αναρροφητήρας προορίζεται για χρήση σε συγκεκριμένο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον. Ο χρήστης του ηλεκτρικού ρινικού αναρροφητήρα πρέπει να διασφαλίζει ότι το προϊόν χρησιμοποιείται σε κατάλληλο περιβάλλον.

Δοκιμή εκπομπών	Συμμόρφωση	Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον – Οδηγίες
Εκπομπές αγώνιμες και εκπεμπόμενες RF CISPR 11	Ομάδα 1 Κλάση B	Ο ηλεκτρικός ρινικός αναρροφητήρας χρησιμοποιεί ενέργεια RF αποκλειστικά για τις εσωτερικές λειτουργίες του. Επομένως, η εκπομπή RF του είναι πολύ χαμηλή.
Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων CISPR 11	Ομάδα 1 Κλάση B	και είναι απίθανο να προκαλέσει παρεμβολές στη λειτουργία γειτονικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Ραδιοσυχνοτική εκπομπή CISPR 11	Ομάδα 1 Κλάση B	Ο ηλεκτρικός ρινικός αναρροφητήρας προορίζεται για χρήση σε όλες τις συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών χώρων και κτιρίων που τροφοδοτούνται από το δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης για οικιακή χρήση, εκτός από την άμεση γειτνίαση με ενεργό HF χειρουργικό εξοπλισμό ή θαλάμους θωρακισμένους έναντι RF ακτινοβολίας που προορίζονται για απεικόνιση με μαγνητικό συντονισμό.
Εκπομπές αρμονικών IEC 61000-3-2	Κατηγορία A	
Μεταπτώσεις τάσης και εκπομπών Τρεμοπαίγμα IEC 61000-3-3	Ισχύοντα	

Οδηγίες και Δήλωση κατασκευαστή – ηλεκτρομαγνητική ανθεκτικότητα			
Ο ηλεκτρικός ρινικός αναρροφητήρας προορίζεται για χρήση σε συγκεκριμένο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον. Ο πελάτης ή ο χρήστης του ηλεκτρικού ρινικού αναρροφητήρα πρέπει να διασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται σε κατάλληλο περιβάλλον.			
Δοκιμή ανθεκτικότητας	Επίπεδο δοκιμής IEC 60601-1-2	Επίπεδο συμμόρφωσης	Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον – οδηγίες
Ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις IEC 61000 -4-2	$\pm 8\text{kV}$ (επαφή) $\pm 2\text{kV}$, $\pm 4\text{kV}$, $\pm 8\text{kV}$, $\pm 15\text{ kV}$ (αέρας)	$\pm 8\text{kV}$ (επαφή) $\pm 2\text{kV}$, $\pm 4\text{kV}$, $\pm 8\text{kV}$, $\pm 15\text{kV}$ (αέρας)	Τα δάπεδα πρέπει να είναι από ξύλο, σκυρόδεμα ή κεραμικά πλακάκια. Εάν το δάπεδο καλύπτεται από συνθετικό υλικό, η σχετική υγρασία πρέπει να διατηρείται σε επίπεδο τουλάχιστον 30%.
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνότητας IEC 61000-4-3	3 V/m (επαγγελματικές μονάδες υγειονομικής περίθαλψης)· 10 V/m (οικιακές μονάδες υγειονομικής περίθαλψης), 80 MHz – 2,7 GHz 80% AM στα 1 kHz	10 V/m (περιβάλλον οικιακής υγειονομικής περίθαλψης) 80 MHz – 2,7 GHz 80% AM στα 1 kHz	
Ταχυδρομικά ηλεκτρικά μεταβατικά φαινόμενα/παλμοί IEC 61000-4-4	Γραμμές ηλεκτροδότησης +2 kV AC· γραμμές τροφοδοσίας/σήματος + 1 kV DC. Συχνότητα επανάληψης 100 kHz.	Γραμμές τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος με τάση +2 kV·	Η ποιότητα τροφοδοσίας δικτύου πρέπει να είναι ισοδύναμη με την ποιότητα που παρατηρείται σε ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ή σε επαγγελματικό περιβάλλον μονάδας παροχής υγειονομικής περίθαλψης.
Κρουσμοί τάσης IEC 61000 -4-5	$\pm 0.5\text{kV}$, $\pm 1\text{kV}$ γραμμή προς γραμμή $\pm 0.5\text{kV}$, $\pm 1\text{kV}$, $\pm 2\text{kV}$ γραμμή προς γη	$\pm 0.5\text{kV}$, $\pm 1\text{kV}$ γραμμή προς γραμμή	Η ποιότητα τροφοδοσίας δικτύου πρέπει να είναι ισοδύναμη με την ποιότητα που παρατηρείται σε ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ή σε επαγγελματικό περιβάλλον μονάδας παροχής υγειονομικής περίθαλψης.

Αγώγιμες παρεμβολές που προκαλούνται από RF πεδία IEC 61000-4-6	3 V 0,15 MHz – 80 MHz, 6 V στις ζώνες ISM μεταξύ 0,15 MHz και 80 MHz (επαγγελματικό περιβάλλον μονάδων παροχής υγειονομικής περίθαλψης), 6 V στις ζώνες ISM και στις ερασιτεχνικές ραδιοσυχνότητες μεταξύ 0,15 MHz και 80 MHz (οικιακό περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης), 80% AM στα 1 kHz	Ισχύοντα	
Προσοχή: Οι ζώνες ISM (βιομηχανικές, επιστημονικές και ιατρικές) μεταξύ 0,15 MHz και 80 MHz είναι από 6,765 MHz έως 6,795 MHz· από 13,553 MHz έως 13,567 MHz· από 26,957 MHz έως 27,283 MHz· καθώς και από 40,66 MHz έως 40,70 MHz. Οι ερασιτεχνικές ραδιοφωνικές ζώνες μεταξύ 0,15 MHz και 80 MHz είναι από 1,8 MHz έως 2,0 MHz, από 3,5 MHz έως 4,0 MHz, από 5,3 MHz έως 5,4 MHz, από 7 MHz έως 7,3 MHz, από 10,1 MHz έως 10,15 MHz, από 14 MHz έως 14,2 MHz, από 18,07 MHz έως 18,17 MHz, από 21,0 MHz έως 21,4 MHz, από 24,89 MHz έως 24,99 MHz, από 28,0 MHz έως 29,7 MHz και από 50,0 MHz έως 54,0 MHz.			

Μαγνητικά πεδία συχνότητας δικτύου IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz ή 60 Hz	30 A/m 50 Hz	Τα μαγνητικά πεδία με συχνότητα δικτύου πρέπει να είναι στα επίπεδα που χαρακτηρίζουν το ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ή το επαγγελματικό περιβάλλον μιας υγειονομικής μονάδας.
Πτώσεις τάσης IEC 61000-4-11	0% UT, 0,5 κύκλου Στους 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° και 315°: 0 % UT, 1 κύκλος και 70% UT, 25/30 κύκλοι Μονοφασικό στα 0°	Ισχύουσες	Η Ποιότητα τροφοδοσίας δικτύου πρέπει να ανταποκρίνεται στο περιβάλλον οικιακής φροντίδας υγείας ή σε επαγγελματική μονάδα υγειονομικής περίθαλψης...
Διακοπές τάσης IEC 61000-4-11	0% UT, κύκλος 250/300	Ισχύουσες	
ΠΡΟΣΟΧΗ: UT είναι η τάση δικτύου εναλλασσόμενου ρεύματος πριν από την εφαρμογή του επιπέδου δοκιμής. Π.χ.: 25/30 σημαίνει 25 κύκλους στα 50 Hz ή 30 κύκλους στα 60 Hz.			

Κατευθυντήριες οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή — ηλεκτρομαγνητική ανθεκτικότητα			
Ο ηλεκτρικός ρινικός αναρροφητήρας προορίζεται για χρήση σε συγκεκριμένο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον. Ο πελάτης ή ο χρήστης του ηλεκτρικού ρινικού αναρροφητήρα πρέπει να διασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται σε κατάλληλο περιβάλλον.			
Δοκιμή ανθεκτικότητας	Επίπεδο δοκιμής IEC 60601-1-2	Επίπεδο συμμόρφωσης	Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον – Οδηγίες
Πεδία εγγύτητας από RF συσκευές ασύρματης επικοινωνίας 61000-4-3	Δείτε τον παρακάτω πίνακα	Ισχύοντα	

Προδιαγραφές δοκιμής για την ανθεκτικότητα της θύρας περιβλήματος σε παρεμβολές από RF ασύρματες συσκευές επικοινωνίας

Συχνότητα δοκιμής (MHz)	Ζώνη (MHz)	Σέρβις	Διαμόρφωση	Μέγ. Ισχύς (W)	Απόσταση	Ελάχιστο άνοιγμα ανοίγματος (cm)
385	380 – 390	TETRA 400	Παλμική διαμόρφωση b) 18 Hz	1,8	0,3	27
450	430 – 470	GMRS 460, FRS 460	FM c) +5 kHz Απτόκλιση 1 kHz Ημιτονοειδής	2	0,3	28
710	704 – 787	LTE Band 13, 17	Παλμική διαμόρφωση b) 217 Hz	0,2	0,3	9
745						
780						
810	800 – 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	Παλμική διαμόρφωση b) 18 Hz	2	0,3	28
870						
930						
1 720 1 845 1 970	1700 – 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Band 1, 3, 4, 25; UMTS	Παλμική διαμόρφωση b) 217 Hz	2	0,3	28

17. Αναφορά ανεπιθύμητων συμβάντων

Το MedWatch είναι πρόγραμμα της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για την αναφορά σοβαρών αντιδράσεων, προβλημάτων ποιότητας προϊόντων, ανισορροπίας ή ανεπαρκούς θεραπευτικής αποτελεσματικότητας και λαθών στη χρήση ιατρικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση, συμπεριλαμβανομένων φαρμάκων, βιολογικών προϊόντων, ιατρικών συσκευών, συμπληρωμάτων διατροφής, βρεφικών προϊόντων και καλλυντικών. Εάν θεωρείτε ότι εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας έχει παρουσιάσει σοβαρή αντίδραση στο ιατρικό προϊόν, σας προτρέπουμε να παραδώσετε το έντυπο αναφοράς στον ιατρό σας. Ο ιατρός σας μπορεί να παρέχει κλινικές πληροφορίες βάσει του ιατρικού σας ιστορικού, οι οποίες θα βοηθήσουν την FDA στην αξιολόγηση της αναφοράς σας. Κατανοούμε, ωστόσο, ότι για διάφορους λόγους μπορεί να μην επιθυμείτε το έντυπο να συμπληρωθεί από τον ιατρό σας ή ο ιατρός σας να αποφασίσει να μην το συμπληρώσει. Ο ιατρός σας ΔΕΝ έχει την υποχρέωση να το αναφέρει στην FDA. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο αναφοράς ηλεκτρονικά μόνοι σας. Μετά την υποβολή της αναφοράς, θα λάβετε επιβεβαίωση από την FDA. Οι αναφορές ελέγχονται από το προσωπικό της FDA. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προσωπικά μόνο εάν χρειαστούμε πρόσθετες πληροφορίες.

Υποβολή αναφορών ανεπιθύμητων συμβάντων στην FDA

Για να υποβάλετε εθελοντικά μια αναφορά ανεπιθύμητου συμβάντος στην FDA, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

1) Ηλεκτρονική υποβολή στη διεύθυνση:

www.accessdata.fda.gov/scripts/medwatch/index.cfm?action=reporting.home

2) Φόρμα αναφοράς καταναλωτή FDA 3500B. Ακολουθήστε τις οδηγίες στη φόρμα για να την υποβάλετε μέσω φαξ ή ταχυδρομείου. Βοήθεια για τη συμπλήρωση της φόρμας μπορείτε να βρείτε στη σελίδα MedWatchLearn. Η φόρμα είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: www.fda.gov/downloads/aboutFDA/reportsmanualsforms/forms/ucm349464.pdf

3) Καλέστε το FDA στο 1-800-FDA-1088 για να το αναφέρετε τηλεφωνικά.

4) Η φόρμα αναφοράς FDA 3500, που χρησιμοποιείται συνήθως από επαγγελματίες υγείας. Η φόρμα είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: www.fda.gov/downloads/aboutFDA/reportmanualsforms/forms/ucm163919.pdf

18. Δήλωση σχετικά με τα ταξίδια ή τη διεθνή χρήση

Επειδή η ηλεκτρική ρινική αναρρόφηση επηρεάζει το περιβάλλον, και λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα και την αστάθεια των συνθηκών ταξιδιού, δεν συνιστάται η χρήση ηλεκτρικού ρινικού αναρροφητήρα κατά τη διάρκεια ταξιδιών ή σε πτήση.

Ο ηλεκτρικός ρινικός αναρροφητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί παγκοσμίως, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται και να φυλάσσεται στο περιβάλλον που ορίζεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης, καθώς και να διασφαλίζεται ότι έχει αγοραστεί τροφοδοτικό συμβατό με τα συστήματα τροφοδοσίας στο εξωτερικό. Για να διασφαλίσετε ότι ο ηλεκτρικός ρινικός αναρροφητήρας δεν θα υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά, πρέπει να ελέγξετε τη συσκευή ώστε να βεβαιωθείτε ότι η κύρια μονάδα και τα αξεσουάρ δεν είναι κατεστραμμένα ή ραγισμένα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε ανωμαλία, η χρήση της συσκευής πρέπει να διακοπεί.

19. Πληροφορίες κατασκευαστή

 Κατασκευαστής: Shenzhen XinLianFeng Technology CO.,LTD
Διεύθυνση: No.5, Tongxi Road, Pingdong Community, Pingdi Street,
Longgang District Shenzhen, CN 518000
E-mail: service@grownsy.com

Εάν χρειάζεστε βοήθεια με τη ρύθμιση, χρήση ή συντήρηση της συσκευής ή θέλετε να αναφέρετε απρόβλεπτη λειτουργία ή περιστατικά, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η GROWNSY δεσμεύεται να δημιουργεί προϊόντα φιλικά προς τον χρήστη, προσαρμοσμένα στις ανάγκες νεογνών και νοικοκυριών. Στόχος μας δεν είναι μόνο η κατασκευή προϊόντων, αλλά και η μετάδοση της φροντίδας και της αγάπης που τρέφουμε για τους πελάτες μας σε κάθε ένα από αυτά. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας μαζί **service@grownsy.com** , και θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε.

Ή στείλτε SMS με τη λέξη **GROWNSY** στον αριθμό **(833)524-0498**.



ΕΓΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ

Στη GROWNSY έχουμε δεσμευτεί να τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας σε όλα τα προϊόντα μας. Μη ξεχάσετε να εγγραφείτε και να αποκτήσετε δωρεάν ετήσια εγγύηση που σας προσφέρει επιπλέον ηρεμία...

www.grownsy.com/warranty



Προστασία του περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός με σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή διάθεσή του, αποφεύγετε ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που σχετίζονται με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαιρεθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου οδηγιών χρήσης, το οποίο δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή διατίθενται στον ιστότοπο <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά, είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα συνεργεία επισκευής, με ευθύνη και έξοδα του χρήστη. Σε περίπτωση που στο εγχειρίδιο χρήσης δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή επισκευής, ο χρήστης οφείλει να αξιολογεί τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, τυχόν αποκλίσεις της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από την κατάσταση ενός καινούργιου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της ανωμαλίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημία του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
οδός Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κατασκευαστής:

DORABOX CO., LIMITED

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 185, ΙΣΟΓΕΙΟ, HANG WAI IND
CTR, NO 6 KIN TAI ST, TUEN MUN NT, XONGK KONFK
Email: xiao@grownsy.com

Υπεύθυνος στην ΕΕ:

CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.

Οδός Długa 33, 102 Zgierz, 95-100, Πολωνία

Μέτρα ασφαλείας

Πριν από την έναρξη της φόρτισης, ελέγξτε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση.

Φροντίστε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείτε να αποσυνδέσετε αμέσως τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας. Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλή θερμοκρασία.

Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, με ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρο από άλλα αντικείμενα.

Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη φόρτιση.

Μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και πιστοποίηση του κατασκευαστή. Φροντίστε την περιουσία σας. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβηστούν, εφοδιασμένες με πυροσβεστικό κάλυμμα.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-ION (λιθίου-ιόντων), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει και δεν αποτελεί έλαττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της κάτω από τα 3,18 V ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας.

Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για την μπαταρία, την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση μη χρήσης της μπαταρίας ή ολόκληρης της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της.

Αποθηκεύετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες προϋποθέσεις για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον αναφερόμενο στην προφορά και δεν αποτελεί έλαττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της σε επίπεδο κάτω από 3,5V ή κάτω από το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V ανά στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση μη χρήσης της μπαταρίας ή ολόκληρης της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της.

Αποθηκεύετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά της μπαταρίας του προϊόντος

Ιδιότητα	Τιμή
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές μπαταρίες λιθίου-ιόντων (Li-Ion)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0,002% Cd, >0,004% Pb)	Όχι
Καθαρό βάρος (kg)	0.0139
Χωρητικότητα (mAh)	-