



ηλεκτρικός θήλαστρος EBP08

Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και να τις φυλάξετε σε ασφαλές σημείο, ώστε να μπορείτε να συμβουλευτείτε αργότερα.

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε θερμά για την αγορά από το κατάστημά μας και για την εμπιστοσύνη που δείξατε στην μάρκα μας.

GROWNSY – ο καλύτερος σύμμαχος των γονέων.

Η GROWNSY δημιουργεί σύγχρονα και προσεκτικά σχεδιασμένα προϊόντα για γονείς. Από έξυπνα αξεσουάρ σίτισης, η GROWNSY προσφέρει μια ευρεία γκάμα προϊόντων για κάθε περίπτωση που αφορά γονείς

και παιδιά. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για μητέρες και παιδιά.

Κατευθυνόμενη από τη βασική φιλοσοφία της «δημιουργίας ιδανικών προϊόντων που εκφράζουν αγάπη και φροντίδα», η Grownsy στοχεύει στην επίλυση των πιο απαιτητικών προβλημάτων κατά την παραγωγή και στην προσφορά των πιο άνετων προϊόντων στους χρήστες μας. Τα προϊόντα Grownsy διακρίνονται για τον σύγχρονο σχεδιασμό, την πρωτοποριακή κατασκευή και την ευφυή εφαρμογή.

Για οποιοσδήποτε απορίες ή προβλήματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

service@grownsy.com

Or visit: www.grownsyofficial.com/warranty

Δεσμευόμαστε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση κάθε θέματος που προκύπτει για τον πελάτη.

Randell

Ιδρυτής της GROWNSY



Ηλεκτρικός θήλαστρος MINI

Ο ηλεκτρικός θήλαστρος MINI έχει σχεδιαστεί ειδικά για τον μητρικό θηλασμό.

Διαθέτει μικρό και φορητό περίβλημα καθώς και μοναδική λειτουργία μασάζ και αναρρόφησης, που προσομοιώνει την πραγματική αναρρόφηση και τη δύναμη αναρρόφησης του παιδιού. Έχει πέντε επίπεδα ρύθμισης και καινοτόμο σιλικονούχο επένδυση μασάζ, προσφέροντας στη μητέρα αποτελεσματικό και άνετο θηλασμό.



Έξυπνος σχεδιασμός μετατροπέα συχνότητας

Ο έξυπνος σχεδιασμός του προϊόντος με λειτουργία μετατροπής συχνότητας επιτρέπει την προσομοίωση της λειτουργίας αναρρόφησης του βρέφους, τη ρύθμιση της δύναμης αναρρόφησης και την εύκολη συλλογή μητρικού γάλακτος.



Μασάζ σιλικόνης σε σχήμα πέταλου

Μασάζ σιλικόνης σε σχήμα πέταλου, μαλακό και φυσικό, που προσαρμόζεται στο στήθος, προσφέροντας άνετο μασάζ και διεγείροντας τη γαλουχία, ενώ ανακουφίζει τον πόνο στο στήθος της μητέρας.



Συσκευή προστασίας από παλινδρόμηση ροής

Αποσπώμενη συσκευή πρόληψης παλινδρόμησης γάλακτος, η οποία αποτρέπει αποτελεσματικά την επιστροφή του γάλακτος στη βασική συσκευή κατά την άντληση και προστατεύει τη βασική συσκευή από βλάβη.



Λεπτό περίβλημα

Λεπτό και συμπαγές περίβλημα, άνετο στο κράτημα, εύκολο στη μεταφορά και στη χρήση για την άντληση μητρικού γάλακτος.



Σχεδιασμός συστήματος συλλογής/αποθήκευσης μητρικού γάλακτος

Εξοπλισμένο με μπιμπερό PP, πιπίλα και αεροστεγές καπάκι, καλύπτει εύκολα τις ανάγκες άντλησης και αποθήκευσης γάλακτος.




Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου μεγάλης χωρητικότητας

Χάρη στην ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου μεγάλης χωρητικότητας, καλύπτει τις ανάγκες καθημερινής άντλησης.

02 Εμφάνιση προϊόντος



Ελέγξτε τα αξεσουάρ πριν από τη χρήση. Σε περίπτωση έλλειψης οποιουδήποτε εξαρτήματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πωλητή.

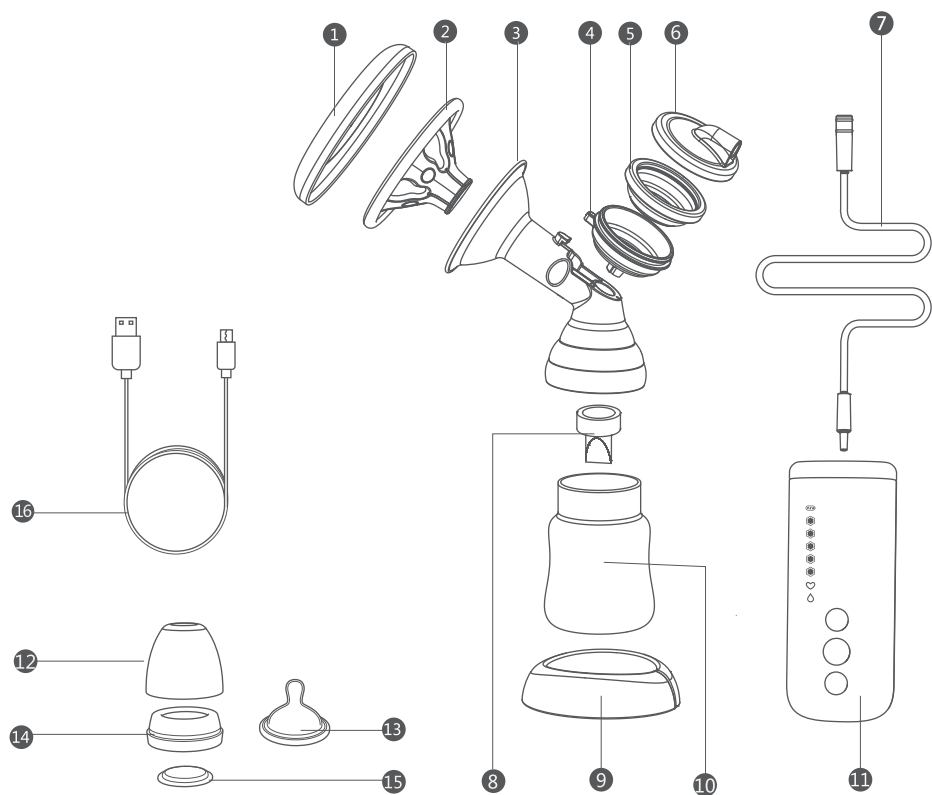

ΑΡ	Όνομα	Υλικό	Εύρος θερμοκρασίας	Ποσότητα
1	Κάλυμμα προστασίας από σκόνη	PP	-20~120°C	1
2	Επιφάνεια μασάζ	Σιλικόνη	-20~200°C	1
3	Προστατευτικό στηθών	PP	-20~120°C	1
4	Βάση μεμβράνης	PP	20~120°C	1
5	Μεμβράνη	Σιλικόνη	-20~200°C	1
6	Προστατευτικό μεμβράνης	PP	-20~120°C	1
7	Σωλήνες	PP+PVC	-5~70°C	1
8	Βαλβίδα	Σιλικόνη	-20~200°C	2
9	Βάση για μπουκάλια	PP	-20~120°C	1
10	Μπουκάλι PP	PPSU	-20~120°C	1
11	Κύρια μονάδα αντλίας	ABS	-20~80°C	1
12	Προστατευτικό πιπίλας	PP	-20~120°C	1
13	Πιπίλα	Σιλικόνη	-20~200°C	1
14	Προσαρμογέας πιπίλας	PP	-20~120°C	1
15	Εσωτερική προσαρμογή	PP	-20~120°C	1
16	Καλώδιο τροφοδοσίας USB	/	/	1



Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει από την εικόνα. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το πραγματικό προϊόν.

Εγκατάσταση

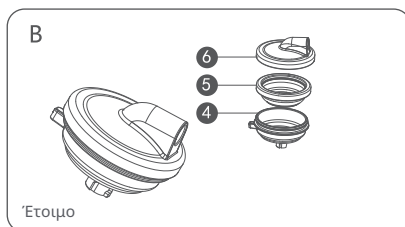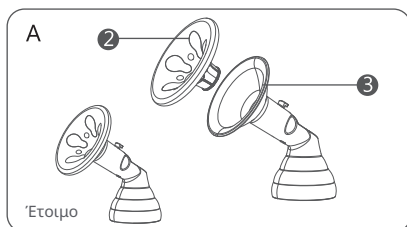



1. Τοποθετήστε το μαξιλαράκι μασάζ 2 στον γιακά 3 και τυλίξτε το αυλάκι της άκρης του μαξιλαριού μασάζ γύρω από την άκρη του γιακά, ώστε να εξασφαλίσετε ακριβή εφαρμογή· (εικόνα Α).

2. Τοποθετήστε τη μεμβράνη 5 στη βάση της μεμβράνης 4, ώστε η άκρη του αυλακιού της μεμβράνης να καλύπτει την άκρη της βάσης της μεμβράνης και να εφαρμόζει καλά. Καλύψτε το καπάκι της μεμβράνης και πιέστε το (εικόνα Β).

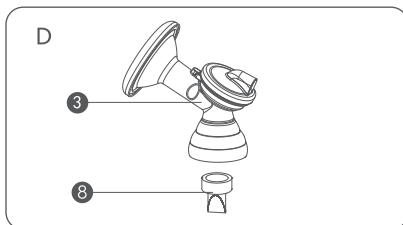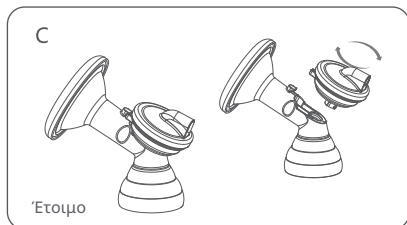

3. Τοποθετήστε τη στήλη που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής στο στρογγυλό άνοιγμα στο επάνω μέρος του φλάντζου 6 σε κατακόρυφη θέση και περιστρέψτε τη δεξιόστροφα για να την ασφαλίσετε καλά· (εικόνα C).

4. Στερεώστε τη βαλβίδα 8 στη στρογγυλή στήλη στο κάτω μέρος του σώματος της θήκης στήθους 3 και βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα έχει πιεστεί πλήρως στη θέση της· (εικόνα D).

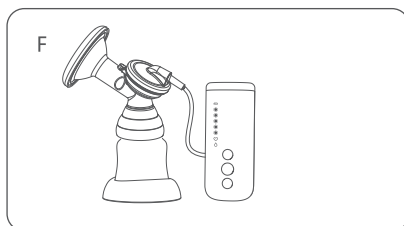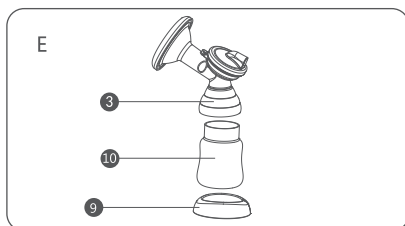

5. Βιδώστε το μπουκάλι γάλακτος με πλατύ λαιμό 10 στο κάτω μέρος του σώματος της θήκης θηλής 3, ώστε να εφαρμόζει σωστά, και στη συνέχεια τοποθετήστε τον πάτο του μπουκαλιού στη βάση του μπουκαλιού 9· (Σχέδιο E)

6. Εισάγετε το ένα άκρο του σωλήνα (με τη σιλικονούχα στεγανοποίηση) στην υποδοχή του σώματος της θήκης θηλής και το άλλο άκρο του σωλήνα συνδέστε το στην υποδοχή αναρρόφησης της κύριας συσκευής.


Η συναρμολόγηση ολοκληρώθηκε και η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση. (Σχέδιο ΣΤ)

Σημείωση: Πριν ξεκινήσετε την άντληση, ελέγξτε ξανά ότι τα κατάλληλα αξεσουάρ έχουν τοποθετηθεί σωστά και εφαρμόζουν καλά.

Σύνδεση στην τροφοδοσία

Ο ηλεκτρικός θήλαστρος διαθέτει θύρα USB και μπορεί να τροφοδοτηθεί με διάφορους τρόπους.

1. Δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή για χρήση.
2. Δυνατότητα σύνδεσης με τροφοδοτικό για χρήση.
3. Δυνατότητα σύνδεσης με φορητή πηγή τροφοδοσίας για χρήση.

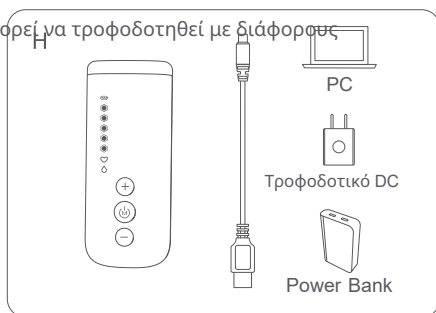


Η συσκευή αναγνωρίζει αυτόματα τη χωρητικότητα της μπαταρίας.

- Η οθόνη της κύριας συσκευής διαθέτει σύμβολο τροφοδοσίας από μπαταρία που δείχνει το τρέχον επίπεδο φόρτισης. Όταν το σύμβολο τροφοδοσίας αναβοσβήνει κατά την ενεργοποίηση ή κατά τη χρήση, σημαίνει ότι η βασική συσκευή χρειάζεται φόρτιση.
- Με τη σύνδεση στην πηγή τροφοδοσίας για φόρτιση, ο δείκτης μπαταρίας στην οθόνη της βασικής συσκευής αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, ο δείκτης μπαταρίας ανάβει με σταθερό φως.

Προσοχή: Πριν από τη φόρτιση με το τροφοδοτικό, απενεργοποιήστε τη συσκευή.

Οδηγίες χρήσης συσκευής αναρρόφησης

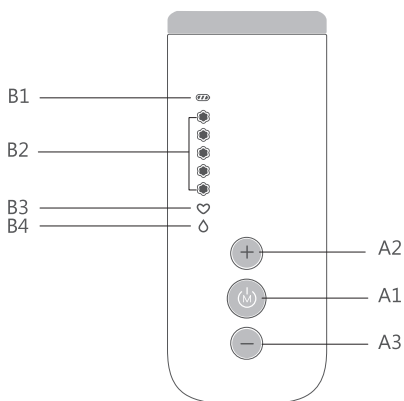

A1: ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

(Σύντομο πάτημα για ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, παρατεταμένο πάτημα για ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

Σε κατάσταση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, το σύντομο πάτημα αλλάζει τη λειτουργία.

A2: Αύξηση επιπέδου

A3: Μείωση επιπέδου

B1: Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας

B2: Ενδεικτική λυχνία επιπέδου

(●●● υποδεικνύει επίπεδο 3

B3: Λειτουργία μασάζ

B4: Λειτουργία έκφρασης

Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί σχεδιασμό αναρρόφησης μεταβλητής συχνότητας.




 L1-L5 Λειτουργία μασάζ, ταχύτερη συχνότητα αναρρόφησης, μικρή δύναμη αναρρόφησης, αποτελεσματικό μασάζ μαστού, διέγερση του αδενικού ιστού του μαστού και επίτευξη του λακτογονικού στόχου.

 L1-L5 Λειτουργία έκφρασης· μμεείται τη λειτουργία αναρρόφησης του βρέφους· αργή συχνότητα αναρρόφησης, μεγάλη τερη δύναμη αναρρόφησης και γρήγορη συλλογή γάλακτος.

Κανόνες λειτουργίας

1. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας και να βεβαιωνόμαστε ότι όλα τα μέρη του ηλεκτρικού θήλαστρου είναι καθαρά και σωστά συναρμολογημένα, σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης.

2. Κατά τη χρήση της συσκευής, η μητέρα πρέπει να κάθεται σε φυσιολογική στάση και να χαλαρώνει. Κάτω από τα πόδια θα πρέπει να τοποθετηθεί μια υποστήριξη για τη διατήρηση της καθιστής θέσης και την αποφυγή πίεσης στη μέση. (Πριν από την έναρξη της άντλησης, η μητέρα μπορεί να εφαρμόσει ζεστές πετσέτες και να κάνει μασάζ στο στήθος για καλύτερο αποτέλεσμα.)

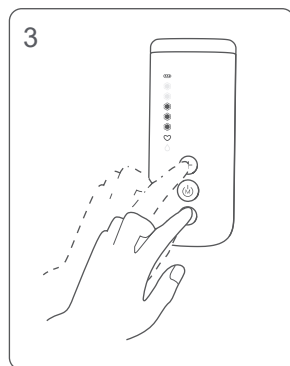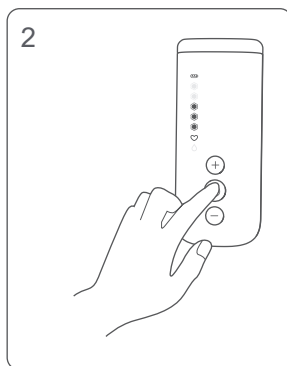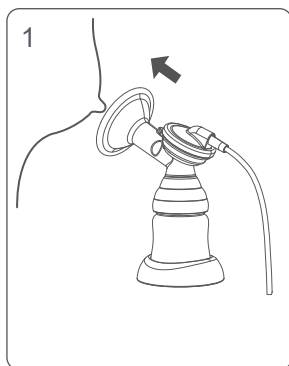

3. Ευθυγραμμίστε το κέντρο της συναρμολογημένης θήκης στήθους με τη θηλή και πιέστε τη σφιχτά στο στήθος. Με το άλλο χέρι στηρίξτε το στήθος ώστε να μην εισέλθει αέρας. (Εικόνα 1)

4. Πατήστε το κουμπί «ON/OFF/Mode» για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Το προϊόν μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία μασάζ, με προεπιλεγμένο επίπεδο το 3. Πατήστε ξανά το κουμπί «ON/OFF/Mode» για να αλλάξετε σε λειτουργία άντλησης γάλακτος, με προεπιλεγμένο επίπεδο το 3. (Σχήμα 2)

5. Σε κανονική λειτουργία μασάζ ή άντλησης γάλακτος, πατήστε το κουμπί «+» ή «-» για να επιλέξετε οποιοδήποτε επίπεδο από L1 έως L5. Το προϊόν θα αποθηκεύσει αυτόματα το επιλεγμένο επίπεδο. Κατά την επόμενη ενεργοποίηση, το προϊόν θα ξεκινήσει αυτόματα στη μνήμη του επιλεγμένου επιπέδου. (Σχήμα 3)

Όταν το προϊόν λειτουργεί, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο «ON/OFF/Mode» για να απενεργοποιήσετε το προϊόν. Μετά από 30 λεπτά λειτουργίας σε κανονική λειτουργία, το προϊόν θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.

Μέτρα προφύλαξης κατά τη χρήση

- Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών και μην αφήνετε το προϊόν χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε μη αυθεντικά τροφοδοτικά.
- Μην βυθίζετε την κύρια αντλία σε νερό για καθαρισμό και απολύμανση. Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτησή της σε αποστειρωτή ατμού για απολύμανση.
- Δεν πρέπει να αποστειρώνονται τα καλώδια. Παρακαλείσθε να προσέχετε ώστε να μην τα στρίβετε ή δένετε κατά τη χρήση.
- Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση του προϊόντος ή των αποσυναρμολογημένων μερών του σε σημεία προσβάσιμα σε βρέφη και μικρά παιδιά, για την αποφυγή κινδύνων.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την περίοδο χαμηλής γαλουχίας, σύμφωνα με τις συστάσεις των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού.
- Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση, η επισκευή ή η αντικατάστασή της από τον χρήστη. Παρακαλείσθε να απευθύνεστε σε βοήθεια στον Κατασκευαστή ή σε ειδικούς. Όλα τα εξαρτήματα του προϊόντος και η συσκευασία πρέπει να φυλάσσονται σε χώρο μη προσβάσιμο από παιδιά.

Μέτρα προφύλαξης κατά τον καθαρισμό

- Παρακαλούμε αποσυναρμολογήστε όλα τα αξεσουάρ που έρχονται σε επαφή με το στήθος ή το μητρικό γάλα (εκτός από την κεντρική μονάδα της αντλίας).
- Παρακαλούμε καθαρίζετε τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το μητρικό γάλα αμέσως μετά τη χρήση, ώστε να αποφύγετε υπολείμματα γάλακτος και ανάπτυξη βακτηρίων.
- Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε τα αξεσουάρ σε στεγνή πετσέτα και φυλάξτε τα σε δροσερό και αεριζόμενο μέρος.
- Κατά την αποσυναρμολόγηση ή τη συναρμολόγηση, να θυμάστε να τοποθετείτε κάθε μέρος σύμφωνα με τη σωστή σειρά συναρμολόγησης. Κατά την αποσυναρμολόγηση και τον καθαρισμό, προσέξτε τα μέρη ώστε να μην χαθούν, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει αδυναμία συναρμολόγησης ή εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής.
- Αξεσουάρ, όπως πιπιλέρο, πιπίλα, θήκη θηλής, μαξιλάρι για μασάζ, μεμβράνη, μπορούν να τοποθετηθούν σε αποστειρωτή για αποστείρωση. (Εκτός από την κύρια αντλία, το τροφοδοτικό, το καλώδιο USB και τα καλώδια).

Επίλυση προβλημάτων

- Αιτία βλάβης: δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της κύριας συσκευής.

Επίλυση:

Επειδή η μπαταρία μπορεί να έχει εξαντληθεί ή να έχει τεθεί σε κατάσταση προστασίας λόγω μακράς αποθήκευσης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον αντάπτορα για να ενεργοποιήσετε την μπαταρία λιθίου.

Για πρώτη χρήση του προϊόντος ή μετά από μακρά αποθήκευση, παρακαλείστε να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία πριν από τη χρήση.

- Αιτία βλάβης: ανεπαρκής αναρρόφηση

Επίλυση:

Ελέγξτε αν η θήκη θηλής εφαρμόζει πλήρως στο στήθος.

Ελέγξτε αν τα κατάλληλα αξεσουάρ έχουν εγκατασταθεί σωστά.

Εάν η θερμοκρασία στο δωμάτιο είναι κάτω από 15°C, ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από 30 δευτερόλεπτα από την ενεργοποίησή της.

Αποθήκευση/θέρμανση μητρικού γάλακτος

Μετά την άντληση μητρικού γάλακτος, πρέπει να κλείσετε αεροστεγώς το καπάκι του δοχείου ή του σακουλιού αποθήκευσης και να το τοποθετήσετε αμέσως στο ψυγείο. Μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο ή στην κατάψυξη.

	Θερμοκρασία δωματίου	Θάλαμος ψύξης	Θάλαμος κατάψυξης
Φρέσκα αντλημένο γάλα μητέρας	Μην φυλάσσετε σε θερμοκρασία δωματίου	Φυλάσσετε στους 4°C για 3-5 ημέρες	Φυλάσσετε στους -16°C για 6 μήνες
Μη καταψυγμένο μη- τρικό γάλα	Χωρίς φύλαξη	10 ώρες	Μην καταψύχετε

Αυτός ο πίνακας αφορά αποκλειστικά υγιή βρέφη άνω του ενός μηνός.

- Κατά την κατάψυξη, μην γεμίζετε το δοχείο μητρικού γάλακτος πάνω από 3/4 του συνολικού όγκου, ώστε να αφήσετε χώρο για τη διαστολή του υγρού.

- Για να αποφευχθεί η απώλεια θρεπτικών συστατικών, συνιστάται το μητρικό γάλα να τοποθετείται στο ψυγείο για φυσική απόψυξη ή να ξεπαγώνει κάτω από τρεχούμενο ζεστό νερό (κάτω των 37°C).

- Πριν από τη χρήση, ανακινήστε απαλά το δοχείο αποθήκευσης του γάλακτος, ώστε το γαλακτικό λίπος να ομογενοποιηθεί.

- Απαγορεύεται η θέρμανση κατεψυγμένου μητρικού γάλακτος σε φούρνο μικροκυμάτων ή σε βραστό νερό, καθώς μπορεί να προκαλέσει απώλεια θρεπτικών συστατικών και εγκαύματα.

Βασικές παράμετροι

Όνομα προϊόντος: Ηλεκτρικός θήλαστρος MINI Μοντέλο: EB 08 Χρόνος φόρτισης

:

Ονομαστική τάση: 5 V ===

Ονομαστικό ρεύμα: 1 A

Ονομαστική ισχύς: 6 W

Μπαταρία: λιθιοπολυμερής μπαταρία 3,7 V 1150 mAh

Πιστοποιητικά: CE, REACH, LFGB

Κατασκευαστής: DORABOX CO., LIMITED

Διεύθυνση κατασκευαστή: SHOP 185 G/F HANG WAI IND CTR NO.6 KIN TAI ST TUEN MUN NT HONG KONG, KINA

Κατασκευαστής:

DORABOX CO., LIMITED

SHOP 185 G/F HANG WAI IND CTR NO 6 KIN TAI ST TUEN MUN NT HONG KONG

Email: xiao@grownsy.com

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ:

CET PRODUCT SERVICE SP. z o. o.

Długa 33 102 Zgierz 95-100 Πολωνία

info@cetproduct.com

Πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία:

Τύπος: μπαταρία λιθίου-ιόντων

Καθαρό βάρος: 0,03 kg

Χωρητικότητα: 1150 mAh

Υπερβαση επιτρεπτού περιεχομένου καδμίου (0,002%) ή μόλυβδου (0,004%):

όχι

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ηλεκτρικού θηλάστρου, των μασάζ και των αξεσουάρ τους βρίσκονται στο επισυναπτόμενο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση αυτών των προϊόντων, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και τηρήστε τις οδηγίες του Κατασκευαστή.

Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε να ενημερωθείτε επίσης για τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος βλάβης των συσκευών:

- Χρησιμοποιείτε τον ηλεκτρικό θηλάστο και τις συσκευές μασάζ αποκλειστικά σύμφωνα με τον σκοπό τους και τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Μην συνδέετε τη συσκευή σε πηγές τροφοδοσίας που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του Κατασκευαστή.
- Αποφύγετε να βραχούν τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής – αυτά τα τμήματα πρέπει να καθαρίζονται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστή.

Κίνδυνος για τον χρήστη:

- Μην χρησιμοποιείτε τον ηλεκτρικό θηλάστο ή τη συσκευή μασάζ εάν υπάρχουν ορατές ζημιές στη συσκευή, όπως ρωγμές ή διαρροές.
- Οι ηλεκτρικοί θηλάστρες και τα αξεσουάρ πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε καθαρό και υγιές δέρμα. Σε περίπτωση ερεθισμών, διακόψτε τη χρήση και συμβουλευτείτε τον ιατρό.
- Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα (π.χ. χόανες, συνδέσεις) είναι καθαρά, στεγνά και σωστά συναρμολογημένα.
- Κίνδυνοι που σχετίζονται με λανθασμένη χρήση:
- Τα δοχεία αποθήκευσης γάλακτος προορίζονται μόνο για φύλαξη τροφής – μην τα χρησιμοποιείτε για θέρμανση ή κατάψυξη, εκτός εάν ο κατασκευαστής έχει υποδείξει διαφορετικά.
- Οι χόανες και οι συνδέσεις πρέπει να ελέγχονται τακτικά για τυχόν φθορές και να αντικαθίστανται όταν απαιτείται, ώστε να διατηρείται η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της συσκευής.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Προετοιμασία και χρήση:

- Πριν από την πρώτη χρήση, πλύνετε προσεκτικά όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το γάλα (χωάνια, συνδέσμους, δοχεία) σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστή.
- Οι ηλεκτρικοί θηλάστρες πρέπει να χρησιμοποιούνται υπό υγιεινές συνθήκες, διασφαλίζοντας την καθαριότητα τόσο της συσκευής όσο και του χώρου χρήσης.
- Οι μασάζ εφαρμόζονται μόνο σε άθικτο δέρμα του μαστού, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστή.

Αποθήκευση και καθαρισμός:

- Μετά από κάθε χρήση, καθαρίζετε σχολαστικά όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το γάλα, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

- Φυλάσσετε τις συσκευές και τα αξεσουάρ σε ξηρό και καθαρό μέρος, μακριά από υγρασία και υψηλές θερμοκρασίες.

- Τα δοχεία γάλακτος φυλάσσονται στο ψυγείο ή στην κατάψυξη σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστή.

Μέτρα προφύλαξης κατά τη χρήση ηλεκτρικού θηλάστρου:

- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας βρίσκονται σε καλή τεχνική κατάσταση πριν από κάθε χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές νερού ή σε υγρό περιβάλλον, για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

- Σέρβις και συντήρηση: Σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σημείο σέρβις. Μην προσπαθείτε να επισκευάσετε τις συσκευές μόνοι σας.

- Καθαρισμός: Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ήπια απορρυπαντικά και χλιαρό νερό για τον καθαρισμό των αξεσουάρ. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά μέσα ή τραχείς σφουγγάρια που μπορούν να βλάψουν την επιφάνεια των εξαρτημάτων.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988.

Ικανοποιούν τις απαιτήσεις για ασφάλεια χρήσης, υγιεινή και υλικά κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα.

Προστασία του περιβάλλοντος



Οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρονικές συσκευές, σημασμένες σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε στο δημοτικό γραφείο, στην υπηρεσία καθαριότητας ή στο κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των Οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφαλούς χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξουδετερωθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή διατίθενται στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις, με δαπάνη και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που το εγχειρίδιο χρήσης δεν αναφέρει απαραίτητες περιοδικές ενέργειες συντήρησης ή σέρβις, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η τυχόν απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτήν ενός φυσικά καινούργιου προϊόντος. Σε περίπτωση εντοπισμού ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή να δοθεί η συσκευή σε επισκευή. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και η μη άμεση αντίδραση κατά την ανίχνευση της ανωμαλίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Οδός Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

Τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Μέτρα Ασφαλείας

Πριν από την έναρξη φόρτισης, ελέγξτε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση.

Φροντίστε ώστε να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα.

Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη φόρτιση.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας: η συσκευή διαθέτει κυψέλες που είναι δύσκολο να σβηστούν· εξοπλιστείτε με πυροσβεστική κουβέρτα.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-ION (λιθίου-ιόντων), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής δομής της γηράσκει με το πέρασμα του χρόνου και της χρήσης.

Ο Κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες παράμετροι λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούρια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από αυτόν που αναφέρεται στην προσφορά, και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της κάτω από το επίπεδο των 3,18V ή κάτω από το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Οι χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για την μπαταρία, την καταστρέφουν οριστικά και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν διακοπεί η χρήση της μπαταρίας ή ολόκληρης της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, πρέπει να φορτιστεί η μπαταρία στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά ανά δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής δομής της γηράσκει με την πάροδο του χρόνου χρήσης. Ο Κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η μπαταρία είναι καινούρια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η αποφόρτισή της κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί η μπαταρία ή ολόκληρη η συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, παρακαλείσθε να φορτίζετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Φυλάσσετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από το ηλιακό φως και από αρνητικές θερμοκρασίες.